

Klinion Personal Protection

nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF



Tilsigtet brug

Medicinsk undersøgelseshandske uden pudder til engangsbrug. Handsken er produceret så handsken kan være tynd og smidig uden at gå på kompromis med brud og trækstyrke. Handsken hjælper med at forhindre kontaminering mellem patient og personale. Den tynde handske giver optimal fingerfølelse ved plejeprocedurer. Nitril undersøgelseshandske (Nitrile Butadiene Rubber)

- Modstandsdygtig over for olie og kemikalier
- Nubrede fingerspidser sikrer et godt greb
- Godkendt til fødevarebrug
- Kort skaft

Klassificering

Klasse I i henhold til Medical Devices Regulations (SI 2002 No. 618, som ændret) klasse I i henhold til forordning (EU) 2017/745 Medical Device Regulation (MDR).

Kategori III under forordningen om personlige værnemidler (PPE) (EU) 2016/425

Funktioner

- Manchet med perler
- Ambidekstral, velegnet til venstre og højre hånd
- Ikke-steril
- Pudderfri ($\leq 2\text{mg/handske}$)
- Fingerspidser med tekstur
- Medicinsk kvalitet med AQL 1,5
- Testet mod opioidopløsning (ASTM D6978)
- Velegnet til håndtering af fødevarer

Klinion Personal Protection

nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF

Specifikationer

<i>Produktets dimensioner (mm)</i>		
Bredde (mm)	XS	75 ± 5
	S	80 ± 10
	M	95 ± 10
	L	110 ± 10
	XL	115 ± 5
Tykkelse (mm)	Manchet	0,07 ± 0,03
	Håndflade	0,08 ± 0,03
	Finger	0,10 ± 0,03
Længde (mm)	Min. 240	Typisk 243 - 250

Kvalitetsstandarder

- Fremstillet i overensstemmelse med kvalitetssikring ISO 13485 og ISO 9001
- Testet i henhold til EN 420:2003+A1:2009; EN ISO 21420:2020; EN ISO 374-1:2013+A1:2018; EN 374-2:2019; EN 374-4:2019; EN ISO 374-5:2016; EN 455-1:2020+A1:2022; EN 455-2:2024; EN455-3:2023; EN455-4:2009; EN 16523-1:2015 + A1:2018.
- Fødevarer sikkerhed i overensstemmelse med EU-direktiv 1935/2004/EF; forordning EU 10/2011; EU 2016/1416; EU 2017/752; EU 2018/213; EU 2018/831; EU 2020/1245.

Opbevaringsforhold

Opbevares på et køligt og tørt sted. Åbnede æsker skal holdes væk fra fluorescerende lys og sollys. Handskerne er pakket i en dispenser, som er velegnet til transport. Opbevar handskerne i æsken, når de ikke er i brug.

Holdbarhed

5 år fra produktionsdato, når det opbevares under de angivne forhold.

Klinion Personal Protection

nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF

EN 16523-1: 2015; Determination of material resistance to permeation by chemicals

Chemical	CAS no	Permeation Levels	Minimum Breakthrough Detection Time (min)	Report No.
40% Sodium Hydroxide (K)	1310-73-2	Level 6	> 480	CH:TX:1142011147
30% Hydrogen Peroxide (P)	7722-84-1	Level 2	34	7191234075-CHM20-02-TSL
37% Formaldehyde (T)	50-00-0	Level 5	361 - 480	CHM0298100/2020/EN/A
98% n-Heptane	142-82-5	Level 5	300	Statement

ASTM D6978

Assessment of Resistance of Medical Gloves to Permeation by Chemotherapy Drugs

Chemotherapy Drug	Concentration (mg/ml)	Minimum Breakthrough Detection Time (min)	Report No.
Arsenic Trioxide	1	>240	PN 149986C
Azacitidine (Vidaza)	25	>240	PN 149986C
Bendamustine	5	>240	PN 149986C
Bleomycin Sulfate	15	>240	PN 149986B
Bortezomib (Velcade)	1	>240	PN 149986A
Busulfan	6	>240	PN 149986B
Carboplatin	10	>240	PN 149986A
Carfilzomib	2	>240	PN 149986C
Carmustine	3.3	13.0	PN 149986G
Cladribine	1	>240	PN 149986C
Cetuximab	2	>240	PN 149986B
Chloroquine	50	>240	PN 149986D
Cisplatin	1	>240	PN 149986B PN 172792A
Cyclophosphamide	20	>240	PN 149986A PN 172792A
Cyclosporin A	100	>240	PN 149986B
Cytarabine	100	>240	PN 149986B
Dacarbazine	10	>240	PN 149986B PN 172792A
Daunorubicin	5	>240	PN 149986B
Decitabine	5	>240	PN 149986C
Docetaxel	10	>240	PN 149986B
Doxorubicin HCl	2	>240	PN 149986B PN 172792A
Epirubicin HCL (Ellence)	2	>240	PN 149986B
Etoposide (Toposar)	20	>240	PN 149986A PN 172792A
Fentanyl Citrate Injection	100mcg/2ml	>240	PN 149986C

Klinion Personal Protection

nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF

Fludarabine	25	>240	PN 149986B
Fluorouracil (5 Flu)	50	>240	PN 149986A PN 172792A
Fulvestrant	50	>240	PN 149986C
Gemcitabine	38	>240	PN 149986A
Idarubicin	1	>240	PN 149986B
Ifosfamide	50	>240	PN 172792A
Irinotecan	20	>240	PN 149986A
Mechlorethamine	1	>240	PN 149986E
Melphalan	5	>240	PN 149986B
Mesna	50	>240	PN 149986C
Methotrexate	25	>240	PN 149986B
Mitomycin C	0.5	>240	PN 149986B
Mitoxantrone	2	>240	PN 149986A
Mitoxantrone HCl	2	>240	PN 172792A
Oxaliplatin	2	>240	PN 149986A
Paclitaxel	6	>240	PN 149986A PN 172792A
Paraplatin	10	>240	PN 149986B
Pemetrexed	25	>240	PN 149986A
Raltitrexed	0.5	>240	PN 149986E
Retrovir	10	>240	PN 149986B
Rituximab	10	>240	PN 149986B
Temsirolimus	25	>240	PN 149986C
Thiotepa	10	46.2	PN 172792A
Topotecan	1	>240	PN 149986B
Triclosan	2	>240	PN 149986C
Trisenox	1	>240	PN 149986B
Vinblastine	1	>240	PN 149986C
Vincristine Sulfate	1	>240	PN 149986A PN 172792A
Vinorelbine	10	>240	PN 149986C
Zoledronic Acid	0,8	>240	PN 149986C

ASTM F739 Standard Test Method for Permeation of Liquids and Gases

Chemical	CAS no	Minimum Breakthrough Detection Time (min)	Report No.
40% Acrylamide	79-06-1	133.3	PN 149986I
50% Benzalkonium Chloride	8001-54-5	>480	PN 149986I
4% Chlorhexidine Gluconate	18472-51-0	>480	PN 149986H
Cidex OPA	Not available	66.7	PN 149986H
37% Hydrochloric Acid	7722-84-1	71.0	PN 149986I
30% Hydrogen Peroxide	7722-84-1	0	PN 149986H
99% Isopropyl Alcohol	67-63-0	27.0	PN 149986H
99% Methanol	67-56-1	0	PN 149986I
0.5% Silver Nitrate	7761-88-8	>480	PN 149986F
40% Sodium Hydroxide	1310-73-2	>480	PN 149986I
13% Sodium Hypochlorite	7681-52-9	>480	PN 149986I

Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF

EN ISO 374-1:2016 + A1:2018; Terminology and performance requirements for chemical risks

Chemical	CAS no	Permeation Levels	Minimum Breakthrough Detection Time (min)	Report No.
Ethanol 70%	64-17-5	Level 1	10	7191305970-CHM23-TSL
Ethidium bromide 5%	1239-45-8	Level 6	> 480	CHM5225V8T7
1-Butanol	71-36-3	Level 1	11	7191339577-CHM24-TSL
Acetic acid 10%	64-19-7	Level 3	106	CHMO034957523191
Chlorhexidone digluconate 40%	18472-51-0	Level 6	>480	CHMO034957523191
Formalin 10%	50-00-0	Level 6	>480	CHMO034957523191
Glutaraldehyde 5%	111-30-8	Level 6	>480	CHMO034957523191
Glutaraldehyde 50%	111-30-8	Level 4	121-180	CHMO034957523191
Hydrochloric acid 36%	7647-01-0	Level 3	73	CHMO034957523191
Nitric Acid 36%	7697-37-2	Level 2	32	CHMO034957523191
Potassium hydroxide 30%	1310-58-3	Level 6	>480	CHMO034957523191
Sodium percarbonate 15%	15630-89-4	Level 5	318	CHMO034957523191

[Chemical listing: Raw Material Chemical Listing](#)

Chemicals	CAS NO.
Nitrile Butadiene Rubber (NBR)	9010-81-5
Zinc Dibutyl Dithiocarbamate (ZDBC)	136-23-2
Zinc diethyl dithiocarbamate (ZDEC)	14324-55-1
2-Naphthalenesulfonic acid	36290-04-7
Sulphur (S8)	7704-34-9
Zinc Oxide (ZnO)	1314-13-2
Titanium Dioxide (TiO2)	13463-67-7
Polymeric sterically hindered phenol	68610-51-5
CI Pigment blue 15:1	147-14-8

Emballage og produktreference

Varenr.	Beskrivelse	Størrelse	Indhold	Ref.nr.
10032468	Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	x-small	Æske á 200 stk. - krt á 10 æsker	1035202
10032469	Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Small	Æske á 200 stk. - krt á 10 æsker	1035212
10032470	Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Medium	Æske á 200 stk. - krt á 10 æsker	1035222
10032471	Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	Large	Æske á 200 stk. - krt á 10 æsker	1035232
10032472	Klinion Personal Protection nitrilhandske, blå, ultra comfort, PF	x-large	Æske á 180 stk. - krt á 10 æsker	1035242