

Mefix®

Selvklæbende fikseringstape
for sikker fiksering af
bandager, slanger og kanyler




Giver sikker, men blid,
fiksering af bandager,
slanger og kanyler.

- Sikker, men blid, selvklæbende fiksering^{2,3}
- Formbar og behagelig at have på⁴
- Hudvenlig: Ikke-sensibiliserende og ikke-irriterende¹
- Åndbar og vandafvisende¹


Sådan anvendes Mefix® - Fiksering ved hjælp af S-kurven



1. Klip den ønskede størrelse.

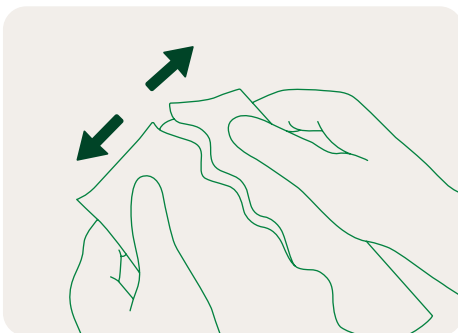

2. Adskil de to dele af beskyttelsespapiret ved at trække/bukke Mefix®. Fjern den smalle del.

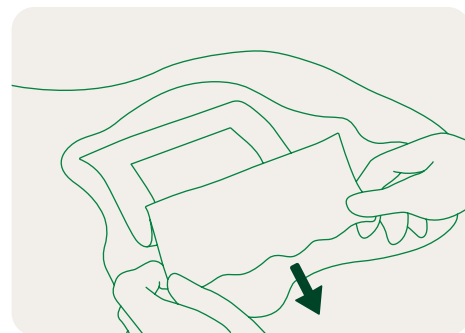

3. Applicér den klæbende side mod huden. Fjern det resterende beskyttelsespapir. Stryg henover bandagen for at opnå optimal klæbefunktion. Stræk ikke Mefix® under applicering.

Sådan virker Mefix®

Den porøse struktur i nonwoven materialet sikrer gennemtrængelighed af luft og fugt.¹ Materialet former sig efter kroppens konturer og er behagelig at have på.⁴ Det selvklæbende materiale er blevet udviklet til at være skånsomt mod huden, samtidig med at det giver sikker fiksering.^{2,3}

Anvendelsesområde

Mefix® kan anvendes i en lang række situationer, hvor der kræves fiksering, herunder fiksering af bandager, slanger og kanyler.

Fordele ved Mefix®

- Hudvenlig
- Tilpasser sig kroppens konturer
- Åndbar, men vandafvisende
- Nem at anvende
- Dækker og beskytter mod ekstern kontaminering
- Behagelig at have på



Mefix® fås som steril i ruller på 2,5 og 10 meter i dispenserbokse.

Rulle, 10 meter

Varenr.	Bredde cm	Inderpk./trp.krt.
310250	2,5	40
310500	5	40
311000	10	20
311500	15	15
312000	20	10
313000	30	10

Rulle, 2,5 meter

Varenr.	Bredde cm	Inderpk./trp.krt.
310570	5	30
311070	10	30
311570	15	20

Referencer: 1. Molnlycke data on file. 2. Livesley J, Richardson S. Securing methods for peripheral cannulae. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain)) : 1987. 1993;7(31):31-4. 3. Kanapathy M, Mosahebi A. Comparative study on the donor site aesthetic outcome between epidermal graft and split-thickness skin graft. International Wound Journal. 2019;16(2):354-9. 4. Gupta SK, Lee S, Moseley LG. Postoperative wound blistering: is there a link with dressing usage? J Wound Care. 2002;11(7):271-3.

Læs mere på molnlycke.com/da-dk

Molnlycke Health Care ApS, Gydevang 39, 3450 Allerød, Tlf.: + 45 80 886 810, e-mail: info.dk@molnlycke.com.
Molnlycke og Mefix varemærker, navne og logoer er registreret globalt til en eller flere virksomheder i Molnlycke Health Care gruppen.
©2025 Molnlycke Health Care AB. Alle rettigheder forbeholdes. DKWC3672509


Molnlycke®