

Qufora® IrriSedo Klick

Til transanal irrigation med højt volumen



Produktkomponenter og produktfunktioner



1500 ml vandpose tilsluttet til en slange og en ventil

- Fritstående på gulvet eller på en overflade i nærheden, eller ophængt, kan placeringen af vandposen tilpasses individuelle præferencer og omgivelser, hvilket muliggør irrigation i alle højder under skulderhøjde
- Den brede hals gør den nem at fylde og tømme. Det indbyggede fliplåg er nemt at bruge. bare åbn og luk det
- Det bløde håndtag er praktisk at bruge, når vandposen er fuld af vand, og robust til at hænge den op i
- Skala, der er nem at aflæse med tydelige markeringer viser mængden af anvendt vand



Kontrolenhed med kompakt pumpe

- Kontrolenheden har en let skive, som er let at dreje og en logisk 1-2-3-4-procedure med uret, med mulighed for at holde pause mellem hver position
- Den integrerede fikseringsrem kan bruges på låret eller kørestolen, og kan fjernes, hvis den ikke er nødvendig
- Pumpen er kompakt, let og nem at klemme



Vandoppustet ballonkateter

- Det hydrofilbelagte kateter til engangsbrug er klart til brug, når det dyppes i vand
- Katetret er udformet, så det er nemt at tage fat om, hvilket sikrer en kontrolleret indføring og udtagning
- Den integrerede vandoppustede ballon holder kateteret på plads og sikrer en sikker forsegling i endetarmen under irrigation



Klik-slange

- Nemme klik-på- og klik-af-sammenkoblinger på kateteret og kontrolenheden
- Lilla elementer angiver, hvor de skal samles – med hørbart og taktilt feedback som bekræftelse på korrekt samling

Materialebeskrivelse

Dele	Materiale	Blødgøringsmiddel
Ballonkateter		
Kateter	TPE	Intet blødgøringsmiddel
Ballon	Silikone	Intet blødgøringsmiddel
Konnektor	ABS	Intet blødgøringsmiddel
Hydrofil polyurethancoating	PVP	Intet blødgøringsmiddel
Klik-slange		
Indvendig-/udvendig slange	Indeholder ikke PVC og ftalater	DEHT/DOTP
Konnektor	ABS	Intet blødgøringsmiddel
Klikkonnektor	ABS/POM/TPE	Intet blødgøringsmiddel
Kontrolenhed		
Låg/hus	ABS/ABS	Intet blødgøringsmiddel
O-ring	Nitril	Intet blødgøringsmiddel
Sort dæksel	EPDM	Intet blødgøringsmiddel
Plastikfjeder	POM	Intet blødgøringsmiddel
Fjeder	Rustfrit stål	
Hovedpakning	TPE	Intet blødgøringsmiddel
Support	POM	Intet blødgøringsmiddel
Forsejling	TPE	Intet blødgøringsmiddel
Fikseringsrem	Polyester/Silikone/PA/Elastane	Intet blødgøringsmiddel
Matteret slange	Indeholder ikke PVC og ftalater	DEHT/DOTP
Pumpe	Indeholder ikke PVC og ftalater	DINCH
Hvid NRV-ventil ud og ind	Hård PVC	Intet blødgøringsmiddel
Net til ventil	Hård PVC	Intet blødgøringsmiddel
Sorte ventilkugler	Nitrile (NBR)	Intet blødgøringsmiddel
Vandpose		
Film	PE/PA	Intet blødgøringsmiddel
Tragt	HDPE	Intet blødgøringsmiddel
Låg	ABS/TPE	Intet blødgøringsmiddel
Antivakuumentil	Silikone	Intet blødgøringsmiddel
Slange	Indeholder ikke PVC og ftalater	DEHT/DOTP
Bag outlet	HDPE	Intet blødgøringsmiddel
Ventil	ABS/HDPE	Intet blødgøringsmiddel
Håndtag	TPE	Intet blødgøringsmiddel
Lilla konnektor	ABS	Intet blødgøringsmiddel

Mål

Dele	Længde	Diameter/bredde	Volumen
Ballonkateter	12 cm	1,1 cm	
Klik-slange	100 cm	1,2 cm	
Vandpose	27 cm	D 10 cm, W 17 cm	1500 ml

Anbefalet brugstid

- Vandposen og klikslangen kan bruges op til 1 måned (15 gange til irrigation hver anden dag og 30 gange til irrigation hver dag)
- Pumpen og regulatoren kan bruges 90 gange
- Kateteret er kun til engangsbrug

Holdbarhed

5 år fra produktion

Bortskaffelse

Der er ikke særlige krav til bortskaffelse af Qufora IrriSedo Klick, og den kan bortskaffes som husholdningsaffald i henhold til lokale retningslinjer og anbefalinger

Klassificering og sterilisering

Qufora IrriSedo Klick er en usteril anordning af Klasse I

Regler og standarder

- MDR (Regulation 2017/745) - CE
- UK MDR 2002 - UKCA
- ISO 13485:2016 (certified)



Fremstillet af:

Qufora A/S
 Gydevang 28-30
 3450 Allerød
 Denmark

Tel: +45 88 300 592
 info@qufora.com
 www.qufora.com

