

## Produktinformation om Navina Classic

### Produktbeskrivelse

Transanalt irrigationssystem med manuel kontrolenhed.

### Holdbarhed og anvendelser

Alle komponenter i Navina-irrigationssystemet har en holdbarhed på 3,5 år, undtagen Navina-katetre og Navina-kateterstudser, som har 2 års holdbarhed. Når Navina-komponenter pakkes i sæt, er det komponenten med den korteste holdbarhed, der bestemmer sættets holdbarhed.

Navina-katetre og -kateterstudser er til engangsbrug, mens vandbeholderen kan bruges 15 gange, og Navina Classic-kontrolenheden og -slangesættet kan bruges 100 gange.

### Materialesammensætning

**Katetermateriale:** Styren-ethylen-butylen-styren (SEBS)/polypropylen (PP) med en hydrofil polyvinylpyrrolidonbelægning (PVP).

**Primært emballagemateriale:** PE/PET-pose.

**Sekundært emballagemateriale:** Karton og bølgepap.

### Tilsligtet anvendelse

Navina-systemerne er beregnet til transanal irrigation ved at tilføre vand til tyktarmens nederste del via et rektalkateter.

### Indikationer for brug

Navina-systemerne har til formål at hjælpe voksne og børn fra 3-års alderen, der lider af fækal inkontinens, kronisk forstoppelse og/eller tidskrævende tarmpleje. Vand, der tilføres tyktarmens nederste del, kan sætte gang i de peristaltiske muskler i tarmen, så de begynder at tømme indholdet fra den nederste del af tyktarmen og endetarmen.

### Kontraindikationer

**Brug IKKE** Navina-systemer, hvis du har en eller flere af følgende lidelser:

- Kendt anal eller colorektal forsnævring.
- Aktiv inflammatorisk tarmsygdom.
- Akut divertikulitis
- Colorektal cancer
- Iskæmisk kolitis
- Inden for de seneste tre måneder har fået foretaget anal eller colorektal kirurgi.
- Du har fået foretaget endoskopisk polypektomi inden for de seneste 4 uger.
- Du er gravid.

Da listen muligvis ikke er udtømmende, skal sundhedspersonalet også altid tage individuelle brugerfaktorer i betragtning.



### Navina Classic System

Reference	Type	Specifikation
6900511 6900711 6901711	Navina Classic-system – Normal Navina Classic-system – Lille Kateterstud til Navina Classic-system	1 Navina Classic-kontrolenhed 1 vandbeholder 1 vandslangesæt 2 rektalkatetre 1 Navina-taske 1 tilbehørssæt
6900611 6900811 6901811	Navina Classic-system Normal påfyldning Navina Classic-system Lille påfyldning Navina Classic-system Påfyldning af kateterstudser	1 Navina Classic-kontrolenhed 1 vandbeholder 1 vandslangesæt 2 rektalkatetre
6900310 6900410 6901610	Navina-forbrugsvaresæt – Normal Navina-forbrugsvaresæt – Lille Kateterstud til Navina-forbrugsvaresæt	1 vandbeholder 15 rektalkatetre
6894010 6894310	Navina-katetersæt – Normal Navina-katetersæt – Lille	10 rektalkatetre
6901110	Navina-slangesæt	1 kateterslange 1 vandbeholder-slange
6901200	Tilbehør til Navina	2 griberinge (1 lodret, 1 vandret) 1 sikkerhedsbånd 1 fikseringsbånd 1 Navina Smart-fikserings-klemme
6901311	Navina Classic-kontrolenhed	1 Navina Classic-kontrolenhed

Navina™ Classic

