

# Sorbact®

## Bakteriebindande och svampbindande tamponad

### Produktbeskrivning

Tamponad av finmaskig bomullsväv med Sorbacts bakterie- och svampbindande effekt. Tamponaden är lämplig att användas i vätskande sårhål, fistelgångar och vid svampinfektioner på huden.

### Bruksanvisning

#### Sårhål och fistelgångar

Fyll hålan/gången med tamponaden (packa inte). Täck med ett vätskeabsorberande förband. Observera att tamponaden kan släppa lösa trådar om man har klippt i den. Se till att den klippta ändan alltid hamnar utanför hålan/gången. Förbandsbyte, dagligen till 2 gånger per vecka.

#### Svampinfektion

I större hudveck används någon av de bredare tamponaderna, medan de smala är lämpliga t ex mellan tår. Fixera med BH/underbyxor eller med hudvänlig häfta. Förbandsbyte, 1 gång per dag.



### Användningsområde

Alla typer av vätskande sår och svampinfektioner där kontroll av mikroorganismer önskas som:

- Trycksår, bensår, fotsår.
- Bölder, fistelgångar.
- Svampinfektioner mellan tår samt i större hudveck

### Fördelar

- Bakterie- och svampbindande
- Ingen risk för resistensutveckling
- Enkelt och använda
- Inga salvor/krämer behövs vid svampbehandling

Produkt	Varunr	Storlek	Antal förp.
Tamponad	98118	1 x 50 cm	20
Tamponad	98121	2 x 50 cm	20
Tamponad	98120	5 x 200 cm	10
Tamponad	98119	10 x 200 cm	10

