

## Bakteriebindande och svampbindande kompress

### Produktbeskrivning

Kompress med Sorbacts bakterie- och svampbindande effekt. Kompressen är lämplig att använda på vätskande sår, oavsett om det är ett ytligt sår eller sårhåla, samt vid behandling av svampinfektioner i hudveck. Kompressen ligger vikt i 8 skikt. Acetatväv.



### Bruksanvisning

#### Sår

Ytliga sår, lägg kompressen direkt mot sårytan.

Djupa vätskande sår: Fluffa upp en eller flera kompresser som läggs direkt i såret (packa inte). Täck med ett vätskeabsorberande förband. Förbandsbyte, beroende på exudatmängd, dagligen till två gånger per vecka.

#### Svampinfektion

Lägg en utvikt kompress direkt mot huden i hudveck och fixera med BH/underbyxa eller hudvänlig häfta.

### Användningsområde

Alla typer av vätskande sår och svampinfektioner där kontroll av mikroorganismer önskas som:

- Trycksår, bensår, fotsår
- Akuta traumatiska sår
- Postoperativa sår
- Svampinfektion i hudveck

### Fördelar

- Bakterie- och svampbindande
- Kan läggas under de flesta förband
- Ingen risk för resistensutveckling

Produkt	Varunr	Storlek	Antal förp.
Kompress	98128	4 x 6 cm	40
Kompress	98125	7 x 9 cm	40