




# Acro Strep A hurtigtestkassett

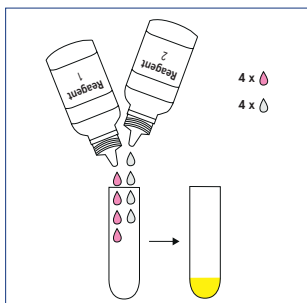


**1** Tilsett 4 fulle dråper rød ekstraksjonsreagens 1 i ekstraksjonsrøret, etterfulgt av 4 fulle dråper fargeløs ekstraksjonsreagens 2. Bland løsningen ved å vende forsiktig på ekstraksjonsrøret. Fargen på løsningen blir gul.

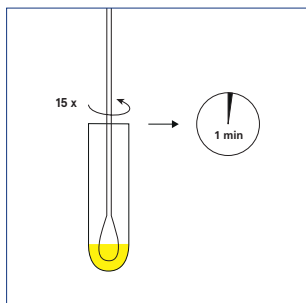

**2** Tilsett prøvepinnen i ekstraksjonsrøret, Roter prøvepinnen kraftig 15 ganger, og la den stå i ekstraksjonsrøret i 1 minutt.

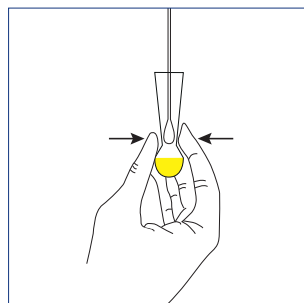


**3** Trykk prøvepinnen mot siden av ekstraksjonsrøret og klem sammen bunnen av røret mens du fjerner pinnen, slik at det meste av væsken forblir i ekstraksjonsrøret. Destruer prøvepinnen.

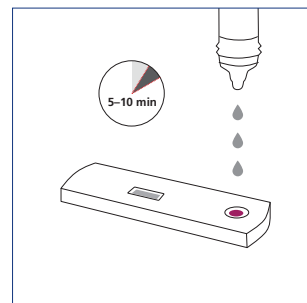


**4** Plasser testkassetten på en ren og jevn overflate. Sett dråpetelleren på toppen av ekstraksjonsrøret og tilsett tre dråper av løsningen i prøvebrønnen. Start tidtakeren. Avles resultatet etter 5 minutter. Resultatet må ikke tolkes etter 10 minutter.


## Tolkning av resultater

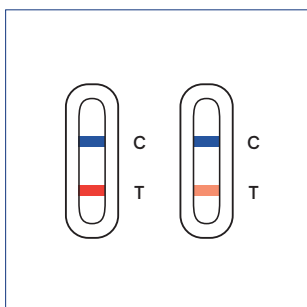

**Positivt resultat**  
To linjer vises. En blå linje vises i kontrollinjeområdet (C) og en rød linje vises i testlinjeområdet (T).

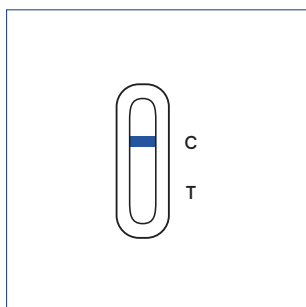

**Negativt resultat**  
En blå linje vises i kontrollinjeområdet (C). Ingen linje vises i testlinjeområdet (T).

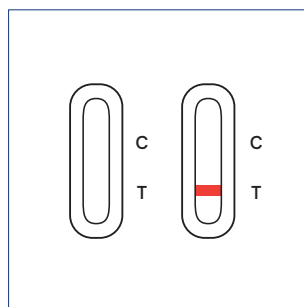

**Ugyldig resultat**  
Kontrollinjen (C) vises ikke. Gjennomgå prosedyren og gjenta med en ny test. Hvis problemet vedvarer, må du slutte å bruke testsettet umiddelbart og kontakte Aidian.

Les pakningsvedlegget før du utfører testen.

# Acro Strep A hurtigtestkassett

Kun for profesjonell *in vitro*-diagnostisk bruk

## Prøvetaking og klargjøring

- Samle halsprøven med den sterile halsprøvepipetten som følger med i settet. Transportpinner som inneholder modifisert Stuarts eller Amies-medium kan også brukes med dette produktet.
- Utfør testen umiddelbart etter prøven er samlet inn. Prøvepipetten kan oppbevares i et rent, tørt plastrør i opptil 8 timer ved romtemperatur eller 72 timer ved 2–8 °C.

## Hurtigtest for påvisning av Strep A-antigen

- *Streptococcus pyogenes*, også kalt Strep A eller GAS-infeksjon utgjør en betydelig årsak til faryngitt. Streptokokk faryngitt er ofte vanskelig å skille fra andre virusinfeksjoner<sup>1</sup>. En hurtigtest gir en raskt og besparende måte å påvise Strep A-infeksjon. Acro Strep A hurtigtestkassett er en kvalitativ lateral-flow hurtigtest for påvisning av Strep A-antigener fra halsprøver og gir et testresultat på mindre enn 10 minutter.

## Enkel i bruk

- Enkel testprosedyre
- Klare fargereaksjoner gir enkel resultattolkning

## Pålitelig og rask

- Pålitelig resultat på mindre enn 10 minutter
- Positiv og negativ kontroll er inkludert
- Internkontroll som sikrer korrekt testfunksjonalitet

Referanse:

1. Finely CR, Chan DS, Garrison S, et al. What are the most common conditions in primary care? *Canadian Family Physician* 2018; 64, 832–840.



## Kontaktinformasjon

Aidian Norway AS

info@aidian.no

Tlf. +47 66 78 56 30

www.aidian.no

Produkt	Produktkode	Bestillingsnummer
Acro Strep A hurtigtestkassett, 20 tests	ISTB-502	154585

For bestillinger:

Mediq Norge AS

Telefon: 67 02 43 00

Epost: kundeservice.no@mediq.com

