



Antibac® Alkoholfri overflatedesinfeksjon

Overflatedesinfeksjon



Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon er basert på hydrogenperoksid og brukes til desinfisering av flater, inventar og utstyr som tåler vann og syre. Produktet er klart til bruk og har dokumentert effekt mot bakterier, gjærsopp og alle virus, blant annet Murine noro, Adeno, Influenza, HIV, Vaccinia og Polio.

Bruksområde

Bruksklar desinfeksjon til overflater som tåler vann og syre. Egner seg godt til bruk på harde, ikke-porøse flater som f.eks. rustfritt stål, plast, gummi, vinyl, laminat, akryl og andre flater. Bør ikke brukes på skinn/lær.

Produktegenskaper

Basert på bredspektret hydrogenperoksid, og er beregnet til daglig desinfisering av flater, inventar og utstyr for å unngå smittespredning. Væsken både rengjør og desinfiserer. God effekt på bakterier, virus og gjærsopp. I tillegg er væsken biologisk nedbrytbar og trygg både for overflater, brukere og miljøet. Godkjent av Statens legemiddelverk.

Testdokumentasjon: EN 14476: virucidal, EN 13727: bacteria, EN 16615: bacteria & yeast, EN 13624: yeast.

Virketid bakterier og virus: fra 30 sekunder. Virketid gjærsopp: fra 1 minutt.

Bruksanvisning

Fordel væsken over hele flaten og sørg for at den er fuktig i henhold til angitt virketid. La objektet lufttørke. Bruk hansker iht. EN 374. Produktet må ikke kombineres med andre produkter.

Innhold

Active stoffer

Hydrogenperoksid

Effekt

Biocide

Oppbevaring

2 års holdbarhet fra produksjonsdato.

Bruker- og miljø sikkerhet

Bruk biocider forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk.

| Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr. | Artikkel nr. | GTIN | GTIN (salgsenhet) | Type forpakning |
|--|--------------|------|-------------------|-----------------|
|--|--------------|------|-------------------|-----------------|

6 x 750 ml

603057

7054956030577

7054957030576

Flaske med
sprayhode**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.