



Antibac® Alkoholfri overflatedesinfeksjon våtservietter

Desinfeksjonsserviett



0044

Antibac® Alkoholfri Overflatedesinfeksjon er basert på hydrogenperoksid og brukes til desinfisering av flater, inventar og utstyr som tåler vann og syre. Serviettene er klare til bruk og har dokumentert effekt mot bakterier, gjærsopp og alle virus, blant annet Murine noro, Adeno, Influenza, HIV, Vaccinia og Polio. Produktene er CE-merket.

Bruksområde

Bruksklare servietter for desinfeksjon av overflater som tåler vann og syre. Egner seg godt til bruk på harde, ikke-porøse flater som f.eks. rustfritt stål, plast, gummi, vinyl, laminat, akryl og andre flater. Bør ikke brukes på skinn/lær.

Produktegenskaper

Basert på bredspektret hydrogenperoksid, og er beregnet til daglig desinfisering av flater, inventar og utstyr for å unngå smittespredning. Væsken både rengjør og desinfiserer. God effekt på bakterier, virus og gjærsopp. I tillegg er væsken biologisk nedbrytbar og trygg både for overflater, brukere og miljøet. Godkjent av Statens legemiddelverk. CE-merket.

Testdokumentasjon: EN 14476: virucidal, EN 13727: bacteria, EN 16615: bacteria & yeast, EN 13624: yeast.

Virketid bakterier og virus: fra 30 sekunder. Virketid gjærsopp: fra 1 minutt.

Bruksanvisning

Fordel væsken over hele flaten med servietten og sørg for at den er fuktig i henhold til angitt virketid. La objektet lufttørke. Bruk hansker iht. EN 374. Produktet må ikke kombineres med andre produkter.

Innhold

Aktive stoffer

Effekt

Hydrogenperoksid

Biocide

Oppbevaring

Uåpnet: 2 års holdbarhet fra produksjonsdato. Åpnet: 28 dager

Bruker- og miljø sikkerhet

Biocider skal brukes med forsiktighet. Les etikett og bruksanvisning før produktet tas i bruk.

Forpakningsstørrelse Salgsenhet / Artikkel nr.	Artikkel nr.	GTIN	GTIN (salgsenhet)	Type forpakning
--	--------------	------	-------------------	-----------------

12 x 100 stk	603055	7054956030553	7054957030552	Boks
12 x 100 stk	603056	7054956030560	7054957030569	Flowpack

**Tilleggsinformasjon**

Sjekk den oppdaterte versjonen av en trykket brosjyre på vår nettside www.kiilto.no, eller send en epost til vår kundeservice post.no@kiilto.com.