

Användningsområden

Cavilon No Sting erbjuder ett långtidsverkande hudskydd mot vätskor, fukt och irriterande ämnen. Cavilon No Sting kan användas på både intakt och redan skadad hud.



Inkontinens

skyddar både intakt och skadad hud mot fukt och irriterande ämnen vid inkontinens

Diarré

skyddar huden mot fukt och irriterande ämnen

Stomi

skyddar huden runt stomier mot hudstripping vid byte av bandage samt mot ev. läckage av urin/avföring

Sårkanter

skyddar sårkanterna mot maceration orsakat av läckage av sårvätska

Dränage

skyddar huden mot kroppsvätskor

Tracheostomi

skyddar huden mot fukt

Hudskydd

skyddar skör och ömtålig hud mot hudstripping under förband och tejp



Hudskydd vid inkontinens och diarré



Hudskydd runt stomier



Skydd runt sårkanter



Skyddar mot hudstripping



Hudskydd runt tracheostomier



Skydd runt dränage

Beställningsinformation

Produkterna kan beställas från landstingsdepåer, återförsäljare och Apoteket. Cavityl kan förskrivas under förbrukningsartiklar Stomi.

3M art nr		Ant/fp	Ant fp/lev fp
3343N	1 ml Applikator	25	4
3345N	3 ml Applikator	25	4
3346N	28 ml Sprayflaska	12	1
3346P	28 ml Sprayflaska	1	12

Innehåll: hexametyldisiloxan, polyfenylmetylsiloxan akrylat terpolymer



Observera

Cavityl ska inte användas på infekterad hud (t ex svampinfektion). Cavityl No Sting är i flytande form brandfarlig. Hålls åtskild från, gnistor, flammor och andra antändningskällor. Använd inte i samband med diatermi. Cavityl ska inte användas under diatermiplattor.

Läs mer om Cavityl hudskyddsprodukter på:

www.cavityl.se

För att skydda och vårda intakt hud kan vi även rekommendera Cavityl Barrier Cream.

¹Grove G.L., Lutz J.B.Schwartzmiller D.H., *Measuring Sting Potential of various Film Forming Skin Protectants*. 3M Health Care, St. Paul, USA. 1994.

²Kennedy K.L., Leighton B., Lutz J.B. *Cost effectiveness evaluation of a new alcohol free film-forming incontinence skin protectant*. Handout from oral presentation at EWMA Conference, Amsterdam, the Netherlands: 1996.

³Grove G.L. *Comparison of the cytotoxicity of alcohol and non-alcohol containing film forming skin protectants*. 3M Health Care, St. Paul, USA.

3M

Hälsövård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se

Please recycle.
3M and Cavityl are trademarks of the 3M company.
© 3M 2008. All rights reserved.

3M Hälsovård
Cavilon™ No Sting - hudbarriärfilm

Skyddar huden effektivt



Pålitligt skydd i upp till 72 timmar

3M

3M™ Cavilon™ No Sting hudbarriärfilm

Cavilon No Sting är en alkoholfri vätska som, när den appliceras på huden, snabbt torkar och bildar en transparent skyddande film.

Barriärfilmen skyddar effektivt huden mot urin, faeces, övriga kroppsvätskor, häftämnen och friktion i upp till 72 timmar.



- Alkoholfri: svider inte¹
- Ger ett pålitligt skydd i upp till 72 timmar²
- Tunn och transparent
- Genomsläpplig vattentät barriär
- Hudvänlig och icke-cytotoxisk³

Hur fungerar Cavilon No Sting?

Cavilon No Sting är en vätska som appliceras på torr och ren hud. Den torkar efter ca 30 sekunder och bildar en tunn transparent skyddande barriär på huden.

Barriären är vattentät och tvättas inte bort med tvål och vatten. Cavilon No Sting skyddar effektivt huden mot irriterande ämen såsom t ex. faeces, urin, sekretion och sårvätska.

Skyddar huden mot Fukt – Vätskor - Häftämnen

- Feaces
- Urin
- Sårvätska
- Övriga kroppsvätskor
- Hudstripping – vid förbandsbyten

Effektivt Hudskydd

Användning:

- Rengör och torka huden före applicering.
- Applikatorpinne: Stryk ut en jämn film över området som ska skyddas.
- Sprayflaska: Håll flaskan 10-15 cm från huden och spraya över hela hudområdet som ska skyddas med en mjuk svepande rörelse.
- Låt filmen torka i 30-60 sekunder. Om Cavilon No Sting appliceras i hudveck, håll isär huden tills filmen har torkat.
- Reapplicering rekommenderas efter varannan till var tredje dag (48-72 timmar) eller oftare vid behov; om den används under häftande material, vid förbandsbyte.

Applikatorpinnar

Sterila engångsapplikatorer för en exakt applicering av mindre hudområden t ex runt sårkanter, stomier, dränage och under häftande material.

1 ml täcker ca 10 cm², 3 ml täcker ca 30 cm².



Sprayflaska

Ger en enkel och kostnadseffektiv applicering av större hudområden, t ex hudskydd vid inkontinens.

Ca 150 appliceringar per flaska



- Det är inte nödvändigt att avlägsna Cavilon, utan den kommer försvinna av sig själv efter ca 72 timmar. Cavilon kan avlägsnas med de flesta medicinska häftborttagningsmedel.
- Undvik att använda andra barriärprodukter, salvor eller krämer i kombination med Cavilon, då de kan avlägsna eller minska produktens effektivitet.
- Cavilon kan användas på vuxna, barn och spädbarn över 1 månads ålder.

Långtidsverkande hudbarriärfilm för frisk och skadad hud

Många äldre patienter i vården drabbas av läckage av urin och avföring. Följden blir hudskador eftersom huden utsätts för fukt och irriterande ämnen. Detta ger i sin tur patienten en kraftigt försämrad livskvalitet. Med Cavilon™ No Sting får patienten större möjligheter till ett behagligare liv.



Fallbeskrivning

Patientprofil: 77-årig kvinna med högersidig CVA och vänstersidig förlamning, rullstolsbunden. Patienten har besvär med konstant avföringsläckage. Behandlat område: sakrum och skinkor 13 cm x 25 cm.



Sakrum med viss rodnad utan nötning.



Fyra veckor efter första behandlingen. Rodnaden fortsatte att förbättras efter appliceringen av Cavilon™ No Sting.