



# Suma Med Rinse Plus

## Surt tork- och blötlägningsmedel för instrumentdisk

### Produktbeskrivning

Suma Med Rinse Plus är ett surt tork- och blötlägningsmedel för instrumentdisk.

### Produktegenskaper

Formulan passar alla typer av disk. Produkten är uppbyggd av en unik blandning av nonjontensider och citronsyra för att ge snabb och fläckfri torkning utan ränder. Suma Med Rinse Plus passar även utmärkt som blötlägningsmedel för instrument med blod, rost och annan smuts. Produkten innehåller effektiv skumdämpare och motverkar effektivt kalkbildning. Passar alla vattenhårdheter.

### Produktfördelar

- Unik kombinerad formula för både torkning- och blötläggning
- Ger snabb torkning av diskgodset
- Fläckfritt diskresultat utan ränder
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Effektiv skumdämpning

### Dosering\*

Suma Med Rinse Plus doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 0.2 - 0.4 ml/L.

Vid blötläggning dosera 1-2 liter Suma Med Rinse Plus till 10 liter varmt vatten (temperatur 40-60 °C). Låt sedan verka i 10 minuter.

Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden.

*\*Denna dosering gäller vid optimala förhållanden, rekommendationerna kan variera, kontakta din Diversey-representant vid behov.*



 Diversey Europe  
Operations B.V.  
Moarssebroeksedijk 2,  
3542 DN Utrecht,  
The Netherlands





# Suma Med Rinse Plus

## Teknisk information

Utseende: Klar färglös vätska  
pH koncentrat:  $\approx < 2$   
pH brukslösning:  $\approx 3$  (20 %)  
Relativ densitet (g/cm<sup>3</sup>; 20°C):  $\approx 1.08$  (20 °C)

*Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.*

## Skyddsföreskrifter och lagring

Fullständig information om hantering och avfallshantering av denna produkt finns i ett separat säkerhetsdatablad, [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Hantera enligt god industriell hygien och säkerhetspraxis. Hålls borta från mat, dryck och djurfoder. Blanda inte med andra produkter om inte Diversey ger råd om detta. Förvaras i slutna originalförpackningar och ska hållas borta från extrema temperaturförhållanden. Produkten är inte avsedd att återanvändas. Endast för professionella användare/specialister.

## Tillgängliga förpackningsstorlekar

Art. nr.	Artikelnamn	System
7511767	Suma Med Rinse Plus 2x5L W3612	Automatisk dos

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2023 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 13/12/2023 sv-SE (P01216)