


Det effektiva absorberande skumförbandet

Absorberande polyuretanskum

- Absorberar sårsekret
- Kan användas under kompression
- Formar sig lätt efter kroppens konturer

Polyuretanfilm på ovansidan

- Andningsbar
- Vätsketät
- Virus och bakteriebarriär*

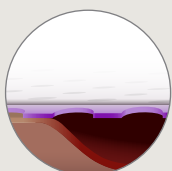

Safetac® teknologi

Safetac är en patenterad vidhäftningsteknologi som är skonsam vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret och på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Safetac® yta

- Minskar smärta och vävnadsskada före, under och efter förbandsbyte¹
- Vidhäftar inte i det fuktiga såret utan endast på den torra huden
- Sluter sig kring sårkanterna och minskar risken för maceration³




* mikrober större än 25 nm

* Mepilex behövs inte klippas till sårets storlek vid kompressionsbehandling

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte^{1,2}
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Enkelt att applicera och glider inte iväg under fixering
- Mycket formbart och kan enkelt klippas till rätt storlek*


Så här används Mepilex®

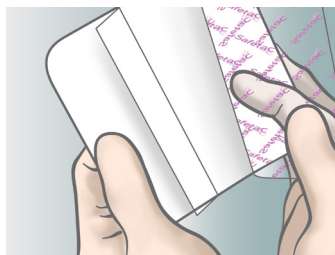

Rengör sårområdet. Ta bort skyddsfilmen.



Mepilex ska överlappa den omkringliggande huden med ca 2 cm. Lägg den kläbbiga sidan mot såret. Sträck inte förbandet.

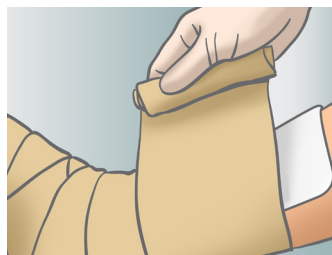

Om nödvändigt, fixera Mepilex med binda eller annan fixeringsprodukt.

Så här fungerar Mepilex

Mepilex är ett mjukt och formbart skumförband som absorberar sårsekret och bibehåller en fuktig sårmiljö. Safetac sluter sig kring sårkanterna, vilket förhindrar att sårsekret läcker ut på den omkringliggande huden och därmed minskar risken för maceration. Safetac är skonsamt vid förbandsbyte och minskar vävnadsskada i såret samt på den omkringliggande huden. Detta minskar smärtan hos patienten.

Fördelar med Mepilex

- Minskar smärta och vävnadsskada vid förbandsbyte
- Frigör båda händerna vilket underlättar applicering av fixeringslösning
- Fungerar bra under kompression
- Förbandet är följsamt och kan enkelt klippas till för att passa områden som är svåra att lägga om
- Skonsam vidhäftning och behagligt att bära
- Kan sitta kvar i flera dagar beroende på sårets tillstånd
- Förbandet kan justeras och återappliceras utan att tappa vidhäftningsförmågan
- Låg risk för hudirritation och allergi

Mepilex levereras sterila, enstycksförpackade

Art.nr.	Storlek cm	Avd fp	Transp fp
294015	5 x 5	5	40
294100	10 x 10	5	70
294200	10 x 20	5	45
294300	15 x 15	5	25
294400	20 x 20	5	20
294500	20 x 50	2	12
Mepilex Heel			
288100	13 x 20	5	25
288300	15 x 22	5	30

Användningsområden

Mepilex kan användas på ett stort antal sår som t.ex. ben- och fotsår, trycksår, traumatiska- och smärtsamma sår, sår med skadad eller ömtålig hud.

Notera

Vid kliniska tecken på infektion kan man fortsätta behandlingen med Mepilex om lämplig infektionsbehandling inleds.



References: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB, Box 13080, 402 52 Göteborg, Telefon 031-722 30 00
The Mölnlycke Health Care name and logo, Safetac and Mepilex are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.



Mölnlycke®