


## Skonsam sårbehandling

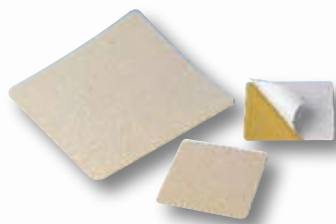

**DuoDERM®  
Hydroactive förband**



**DuoDERM® E  
förband**




**DuoDERM®  
Pasta**

DuoDERM® Pasta och DuoDERM®-plattor är en serie sårförband som används till ocklusiv fuktighetsbevarande sårbehandling. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårhäkningsprocessen. DuoDERM-plattor har det mesta gemensamt. De består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som bl a innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. På ovansidan finns en polyuretan film/foam. DuoDERM-plattan har en diskret färg. Kan användas vid bad och dusch. De flesta plattorna kan klippas till lämplig storlek och form. Byten sker vid behov – minst en gång/vecka. Värm gärna plattan med händerna innan den appliceras på såret. Applicera sedan DuoDERM med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna. Se till att huden är torr så att plattan fäster bra. Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts det när förbandet är mättat.



## DuoDERM® HYDROACTIVE FÖRBAND

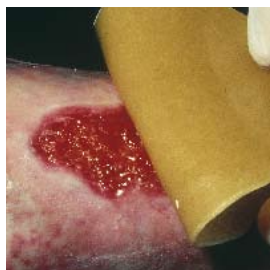

DuoDERM är ett smidigt förband som passar speciellt bra för mindre till måttligt vätskande sår.

DuoDERM-materialet skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM fungerar som en bakterie- och virusbarriär<sup>1</sup> när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.

### DuoDERM® Hydroactive förband

Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	263459
10 x 10 cm	20 st	281444
20 x 20 cm	3 st	263467

## DuoDERM® E FÖRBAND



DuoDERM E är ett smidigt förband som passar speciellt bra för mindre till måttligt vätskande sår.

DuoDERM-materialet skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess och hjälper till att skydda huden runt såret. DuoDERM fungerar som en bakterie- och virusbarriär<sup>1</sup> när förbandet är intakt och inget läckage förekommer.

### DuoDERM® E

Storlek	Förp.	Vnr
10 x 10 cm	5 st	293142
10 x 10 cm	20 st	281469
15 x 20 cm	10 st	281477
20 x 20 cm	3 st	281485
20 x 30 cm	3 st	281493

## DuoDERM® PASTA



DuoDERM Hydroactive Pasta är en mjuk och smidig pasta som används tillsammans med DuoDERM-platta till bandagering av djupa sår. Applicera Pastan på såret eller i sårhålan och jämna ut Pastan med en steril spatel eller använd sterila handskar och jämna ut det med fingret.

DuoDERM Hydroactive Pasta skapar en fuktig sårhelingsmiljö som understödjer kroppens sårhelingsprocess. Som täckförband kan DuoDERM användas.

### DuoDERM® Hydroactive Pasta

Storlek	Förp.	Vnr
Tub à 30 gram	1 st	297044

## FAKTA

### DuoDERM HYDROACTIVE FÖRBAND

DuoDERM Hydroactive förband är en steril, självhäftande tvåskiktspatta som innehåller pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och polyisobutylen. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3 cm av huden runt såret. DuoDERM Hydroactive förband kan sitta kvar på såret i upp till sju dagar eller så byts det när det är mättat.

### DuoDERM E

DuoDERM E är en steril, självhäftande tvåskiktspatta bestående av pektin, gelatin, natriumkarboxymetylcellulosa (CMC) och syntetiska elastomerer. Ovansidan består av polyuretanskum. Plattan finns i flera storlekar, kan klippas till efter behov och bör täcka ca 3 cm av huden runt såret. DuoDERM E byts vid behov eller minst en gång per vecka.

### DuoDERM HYDROACTIVE PASTA

DuoDERM Hydroactive Pasta består av DuoDERM-material med bl a gelatin, pektin och natriumcarboxymetylcellulosa upplöst i en mineralolja. Pastan håller sig mjuk och smidig och blir gradvis mer tunnflytande när den absorberar sårexsudat. DuoDERM Hydroactive Pasta är lätt att skölja bort ur såret med steril NaCl.

### FÖRVARING/HÅLLBARHET

Förvaras torrt i rumstemperatur. Hållbarhet 5 år.

### STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserad.

### KLASSIFICERING

DuoDERM Hydroactive, E och Pasta är CE-märkta och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För ytterligare information se bruksanvisning i respektive förpackning.