



Snabb och enkel kirurgisk sårförslutning

Hudstapling innebär en enkel och effektiv metod för förslutning av kirurgiska sår. Jämfört med förslutning med sutur innebär stapling ett tidsbesparande och kostnadseffektivt sårförslutningsalternativ¹. Dessutom har hudstapling visats ge ett fint kosmetiskt resultat och en minskad risk för sårinfektion jämfört med icke-resorberbar sutur.² Precise™ och Precise™ Vista hudstaplers har en ergonomisk design och är enkla att använda.

3M™ Precise™ stapler

Snabb och smidig

3M™ Precise™ är en liten och smidig stapler avsedd för engångsbruk. Staplern är designad så att den vid applicering ger utrymme mellan hud och staple, för att undvika "strypeffekt" vid ödem och underlätta borttagandet.


Precise stapler är utformad för att vara liten och lätthanterlig och inte skymma sårkanterna. Eftersom agraften syns på toppen av staplern har man vid applicering möjlighet till visuell kontroll av placeringen.

Agrafterna i Precise™ stapler är gjorda av rostfritt stål som tolereras väl och i studier visats reducera vävnadsreaktion och inflammation jämfört med sutur³.



Mångsidighet och flexibilitet

Precise™ stapler har hjärtformade agrafter och är laddade med 5, 15 eller 25 stycken agrafter.

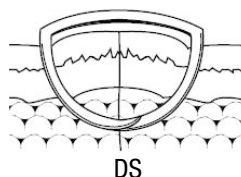

Applicering

3M™ Precise™ levereras individuellt sterilförpackad, klar för användning. Agrafterna appliceras med lätt tryck på everterade, sammanhållna sårkanter. Vid applicering hålls staplern i 90° vinkel mot hudplanet, se nedan. Den första agraften sitter med spetsarna i synlig position, för att påföljande agraft skall komma i denna position kläms staplern ihop lätt.



Snabbt enkelt kostnadseffektivt

3M™ Precise™ Vista stapler

Hög kvalitet och användarvänlighet

3M™ Precise™ Vista hudstapler har genom sin ergonomiska design en mycket god passform i handen. Det vinklade huvudet gör också det enklare att se sårområdet och åstadkomma en god sårförslutning.



Säker och anpassningsbar

3M™ Precise™ Vista har en flexibel utlösningmekanism. Stiften kan placeras oavsett staplarnas position.

Agrafferna i Precise™ Vista stapler är gjorda av rostfritt stål som tolereras väl och i studier visats reducera vävnadsreaktion och inflammation jämfört med sutur³. Precise™ Vista hudstapler finns med 15 eller 35 rektangulära agraffer.



Stapler borttagare

Förutom hudstaplers finns i 3Ms sortiment även staplerborttagare.



Produktnummer	Beskrivning	Antal/ förp	Förp/ lev förp
DS5W	Precise™ stapler, 5 hjärtformade agraffer	12	4
DS15W	Precise™ stapler, 15 hjärtformade agraffer	12	4
DS25W	Precise™ stapler, 25 hjärtformade agraffer	12	4
3996	Precise™ Vista stapler, 15 rektangulära agraffer*	6	4
3995	Precise™ Vista stapler, 35 rektangulära agraffer*	6	4
SR3	Staplerborttagare, saxmodell	10	3

*Nickelhalt 10-14%

1. Kanegaye JT et al. Comparison of skin stapling devices and standard sutures for pediatric scalp lacerations: a randomized study of cost and time benefits. J Pediatr 1997; 130:808-13

2. Chamas PJ, Cragel MD; Journal of Foot and Ankle Surgery; Vol. 32; Issue 5; 1993 536-538

3. Yukio Nagamach, World Journal of Surgery, Volume 12, Number 5, October 1988, 635-640



Hälsovård
3M Svenska AB
191 89 SOLLENTUNA
Tel: 08-92 21 00 vxl
Fax: 08-92 22 89
www.3M.com/se