

HELT ENKELT MER EFFEKTIV.

ALERE AFINION™ CRP

Alere Afinion™ CRP är ett in vitro-diagnostiskt snabbtest för kvantitativ bestämning av C-reaktivt protein (CRP) som bidrar till att minska den diagnostiska osäkerheten samt under patientbesöket bedöma om antibiotikabehandling är lämplig.¹

- 2,5 µL provvolym
- 3 minuters analystid
- Tillförlitliga resultat
- Mätintervall för helblod 5–200 mg/L
- Ingen kalibrering krävs av användaren
- Ingen interferens från antibiotika eller smärtlindrande läkemedel²



Alere Afinion™ CRP

FAKTA

Alere Afinion CRP är ett enkelt prov som tas med ett stick i fingret och tillhandahåller patientens CRP-värde inom några minuter, under konsultationen.

- Provmaterialet utgörs av helblod, serum eller plasma
- Korrekt analys av helblod med automatiskt hematokritkorrigering
- Utmärkt korrelation med laboriemetoder
- Utmärkt precision över hela mätintervallet
- 4 veckors lagring i rumstemperatur

TESTREKOMMENDATIONER

Patientnära tester hjälper den diagnostiska osäkerheten och möjliggör en mer målinriktad och förständig antibiotikavårdning.³

- Tester inom primärvården kan minska användningen av receptbelagda antibiotika för RTI med upp till 42 %
- Patientnära CRP-tester måste alltid tolkas med hänsyn till den kliniska bedömningen i övrigt

PROCEDUR I 3 STEG

- 1** Ta prov med hjälp av den medföljande provtagningskapillären.



- 2** Placera provet i testkassetten.



- 3** Placera testkassetten i analysinstrumentet och stäng luckan. Analysen startar automatiskt.



NYA ANALYSINSTRUMENTET AFINION 2



Analysinstrumentet Afinion 2 är resultatet av många års kontinuerlig produktförnyelse och förbättringar som ger patientnära, åtgärdbara provresultat på några få minuter.

Med sin kompakta storlek och testpanel, är Afinion 2-systemet idealiskt för patientnära provtagning på läkarmottagningar, kliniker, vårdcentraler, läkarstationer, äldreboenden, akutmottagningar och öppenvårdsmottagningar. Med ett kapillärprov får man redan under pågående konsultation analysresultat med laborierkvalitet för CRP, HbA1c, ACR och lipidprofil.

TILLGÄNGLIGA TESTER

ALERE AFINION™ ACR
ALERE AFINION™ CRP
ALERE AFINION™ HbA1c
ALERE AFINION™ LIPID PANEL

1. Stanton, N., Francis, N.A. and Butler, C.C. British Journal of General Practice 2010 Dec;60(581):e466-75.
2. Afinion CRP_Package Insert NOR_1116528_revB_PL_020218.pdf
3. Straight to the Point! Ensuring the Rational Use of Antibiotics in Primary Care using C-Reactive Protein Testing. En konsensusrapport.

© 2018 Abbott. Alla rättigheter förbehålls. Abbott-logotypen, Abbott och Afinion är varumärken som tillhör Abbott-gruppens företag. Alla bilder som visas är avsedda endast för illustrativa syften. Alla personer på sådana bilder är modeller. CVD107965 10004225-01 09/18