



Självhäftande absorberande förband

Mepore är ett andningsbart, självhäftande förband för suturerade torra och svagt vätskande sår. Den hudvänliga, vattenbaserade, lösningsmedelsfria polyakrylathäftan ger en varsam men säker fixering.



Så här används Mepore



Öppna förpackningen och ta ut förbandet.



Ta tag i greppkanten på skyddspappret och lossa det en liten bit så att förbandet kan fästas på huden.



Fäst förbandet på huden utan att sträcka det och ta försiktigt bort resten av skyddspappret. Stryk och värm med handen över kanterna så att förbandet fäster ordentligt.

Så här fungerar Mepore

Den porösa strukturen i nonwovenmaterialet gör förbandet ångpermeabelt. Materialet är elastiskt och smidigt vilket gör det möjligt att röra sig obehindrat när förbandet sitter på. Det är icke-absorberande och utgör en barriär som förhindrar blod och sårsekret att läcka igenom. Polyakrylathäftan har utvecklats för att vara hudvänlig samt för att ge säker fixering. Sårdynan kan absorbera mätliga mängder av sårsekret och den lågvidhäftande ytan minskar risken för att den fastnar i såret. Skyddspappret är lätt att avlägsna och möjliggör enkel och steril applicering.

Fördelar med Mepore

- Hudvänlig, vattenbaserad häfta
- Kontaktyta med låg vidhäftning som minskar risken för att förbandet ska fastna i såret
- Vätskeavstötande baksida
- Skyddspapper som är lätt att ta av underlättar applicering
- Ångpermeabelt – förebygger maceration och behagligt att bära
- Runda hörn för säker fixering (alla storlekar upp till 9 × 15 cm)

Mepore sortiment (levereras sterila, enstycksförpackade)

	Art nr	Storlek cm	Storlek sårdyna cm	Avd fp	Trp fp
	670800	6 × 7	3 × 4	60	480
	670900	9 × 10	4,5 × 6	50	400
	671000	9 × 15	4,5 × 10	50	400
	671100	9 × 20	4,5 × 15	30	180
	671200	9 × 25	4,5 × 20	30	180
	671300	9 × 30	4,5 × 25	30	270
	671400	9 × 35	4,5 × 30	30	180
Apotekssortiment	670870	6 × 7	3 × 4	10	140
	670970	9 × 10	4,5 × 6	5	100
	671070	9 × 15	4,5 × 10	5	70
	671170	9 × 20	4,5 × 15	5	70

Mepore finns också osteril på 5- och 2-metersrulle

	Art nr	Storlek cm	Bredd sårdyna cm	Trp fp
5 meter	331900	4	1,5	24
	332000	7	3	18
2 meter	331980	4	1,5	30
	332080	7	3	21

Mer information på www.molnlycke.se

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon 031 722 30 00
www.molnlycke.se www.molnlycke.se/patient

The Mölnlycke Health Care name and logo and Mepore® are registered trademarks of Mölnlycke Health Care AB.

Bytesfrekvens

Bytesfrekvensen avgörs av sårets tillstånd. Vid avlägsnande – ta tag i kanten och dra försiktigt av förbandet i hårens växtriktning.

Användningsområden

Mepore kan användas på ett stort antal svagt vätskande sår, t.ex. suturerade sår, skär- och skrubbsår.

Observera

Precis som andra självhäftande förband ska Mepore inte sträckas vid applicering eftersom det kan skada huden. Detta är särskilt viktigt när förbandet appliceras över leder. Förbandet ska ej användas på personer med allergi mot någon ingående komponent.

