



DES 70

Ytdesinfektion för rena ytor

Användningsområde

DES 70 är en etanolbaserad ytdesinfektion avsedd för rena ytor. Används för att förebygga och förhindra mikrobiologisk smittspridning via ytor och föremål. Produkten är avsedd att användas inom sjukvård, vård- och omsorg och laboratorieverksamhet.

Produktfakta

DES 70 är en etanolbaserad ytdesinfektion fri från Castoroil. Produkten är avsedd att användas på rena ytor. Har effekt på grampositiva- och gramnegativa bakterier, svamp och vissa typer av höljesförsedda virus typ influensavirus (H1N1, H5N1), Herpes Simplex, HIV, Hepatit B & C, Bovine Viral Diarrhoea Virus. Har effekt mot vissa nakna virus som Murint Norovirus (surrogat till humant norovirus & Hepatit A-virus). Uppfyller EN13727, EN13624 EN13697, EN1276, EN1650.

Art.nr

17030001

Antal per kartong 12* 1L

Flaska med sprutkapsyl

Bruksanvisning

DES 70 används utspädd. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper. Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minimum 1min. Ytan ska vara fuktig under hela verkningstiden. Låt ytan lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Dosering

Applicera flytande koncentrat flödigt på ytan eller på en torkduk. Generell verkningstid: 1-5min. Se etikettens baksida för detaljerad information.

Innehåll

Ethanol, Isopropyl Alcohol, t-butyl-cohol, Aqua

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i oöppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tomma och ursköljda emballage ska sorteras som "förpackning av plast"

Ej helt tomma förpackningar sorteras som "farligt avfall"

