

Tegaderm™ Film  
Polyuretanfilm



Säker för patienten  
enkel för dig



#### **Tegaderm™ Film - Polyuretanfilm**

Tegaderm™ Film är en tunn och elastisk polyuretanfilm med ramsystem som bl a kan användas som primärförband på ytliga hudskador, som täckförband över andra absorberande förband samt till fixering av infarter. Det pålitliga varumärket inom transparenta filmförband.

**3M**

# Tegaderm™ Film

## Polyuretanfilm

### Egenskaper

- **Mycket tunn och elastisk** - Tegaderm™ Film är mycket följsam vid ödembildning och över leder. Följsamheten gör förbandet komfortabelt för patienten.
- **Transparent** - För visuell kontroll av sår eller underliggande förband.
- **Unikt häftämne** - Hudvänligt häftämne som täcker hela ytan av filmen för en säker fixering. Lämnar ej häftämnesrester på huden.
- **Semipermeabel** - Tegaderm™ Film är genomsläpplig för fukt och syre, vilket låter huden "andas" och bibehålla sin naturliga fuktighet. Förbandet släpper inte igenom bakterier och vätskor vilket ger en barriär mot kontamination och ett skydd mot maceration.
- **Noteringstejp** - En Micropore™ tejp sitter på ramen som kan användas till signering och till borttagning av förbandet.

### Applicering

Snabb och enkel applicering med Tegaderm™ Film ramsystem. Ramsystemet säkrar en aseptisk hanteing och hindrar hoprullning av förbandet. Applicering med ramsystemet säkrar en bra fixering av förbandet samt minimerar risken för mekaniska hudskador som t ex spännblåsor.

Välj en förbandsstorlek anpassad efter såret. Förbandet bör gå ca

2,5 cm utanför såret på omkringliggande hud.

1. Håll förbandet i fliken på sidan och dra bort skyddspappret från baksidan. Håll förbandet över såret med den häftande sidan nedåt. Undvik att sträcka eller dra i förbandet.
2. Tryck försiktigt förbandet på plats och stryk med handen från mitten och utåt.
3. Avlägsna ramen samtidigt som du pressar lätt på förbandet för att säkerställa en god vidhäftning av kanten på förbandet.

### Indikationer:

- Rena kirurgiska sår - som ett postoperativt förband
- Täckförband - över geler, alginater och hydrokolloida förband för att ge en bra fixering samt bibehålla fuktig sårsläkning.
- Ytliga sår som inte vätskar för mycket.
- Trycksårsprofilax - som skydd mot hudskador orsakade av friktion och skjuvningseffekt
- Hudskydd - till täckning av sår och andra hudskador vid dusch och bad.
- Fixering av infarter och medicintekniskt material t ex centrala venkater, insulinpumpar och subcutan venport.



- Det pålitliga varumärket Tegaderm™
- Enkel och säker fixering med ramsystem
- Noteringstejp



Hälsovård  
3M Svenska AB  
191 89 SOLLENTUNA  
Tel: 08-92 21 00 vxl  
Fax: 08-92 22 89  
www.3M.com/se

### Beställningsinformation

| Art nr | Storlek             | Ant/fp | Fp/lev fp |
|--------|---------------------|--------|-----------|
| 1622W  | 4,4 x 4,4 cm        | 100    | 4         |
| 1624W  | 6 x 7 cm            | 100    | 4         |
| 1626W  | 10 x 12 cm          | 50     | 4         |
| 1627   | 10 x 25 cm          | 20     | 4         |
| 1628   | 15 x 20 cm          | 10     | 8         |
| 1629   | 20 x 30 cm          | 10     | 8         |
| 1630   | 10 x 11,5 cm (oval) | 50     | 4         |