

URYXXON® Relax

Automatiskt avläsningsinstrument för Medi-Test urinremsor



- Liten och enkel
- Pekskärm
- Tillförlitliga resultat på alla parametrar
- Anslutning till LIS/HIS
- Utvärderat av SKUP

URYXXON® Relax urinavläsare med Medi-Test stickorna är utmärkt att använda på vårdcentraler och husläkarmottagningar vid screening av urin. All data skannas in alternativt skrivs in manuellt. För flexibel datahantering kan URYXXON® Relax enkelt anslutas.

Medi-Test stickorna ger tillförlitliga resultat på alla parametrar utan att påverkas av kända felkällor som C-vitamin eller urintemperatur. URYXXON® Relax och Medi-Test stickorna är SKUP-utvärderad med goda resultat.

Pekskärm i tillägg till automatisk analysering, gör instrumentet mycket lätt och hygienisk att använda. Underhåll av URYXXON är minimalt, skölj släden dagligen med vatten och vid behov kan desinfektionsmedel användas.

URYXXON® Relax och Medi-Test urinstickor är tyska kvalitetsprodukter tillverkat av en av världens största producenter av urinstickor med avläsare.

TEKNISKA DATA

Stickor:	Medi-Test Combi 5 L: blod, protein, nitrit, glukos, leukocyter, Medi-Test Combi 7 L: blod, protein, nitrit, glukos, leukocyter, ketoner, pH Medi-Test URYXXON Stick 10: Samma som Medi-Test Combi 7 L men med bilirubin, urobilinogen och densitet
Kontroll:	Medi-Test Control Neg och Pos. Kontrolllösningen är färdig att använda.
Kalibrering:	Självkalibrerande
Analystid:	1 min
Enhet:	Konv, SI, ARB, konv + ARB, SI + ARB
Gränssnitt:	Användare : pekskärm, alfanumerisk inmatning, lösenordsskydd PC: USB-port och RS232 PS/2 port för anslutning av skanner eller tangentbord
Ström:	110-240 V AC
Storlek:	20x16x7, 5 cm, vikt 710 g

Artikelnr.	Artikelnamn
93088	Avläsare urinremsa URYXXON Relax
93008	Urinremsa Medi-Test Combi 5L/100
93031	Urinremsa Medi-Test Combi 7L/100
93068	Urinremsa Medi-test 10 /100
93038	Urinkontroll Medi-Test 15ml control pos/neg
032705	Reg papper /5

Snabbhandbok till URYXXON® Relax Urintest och dagligt underhåll

Testa nytagna urinprover inom 2 timmar efter att provet har lämnats. Kylta urinprover måste värmas till rumstemperatur innan de testas (15–30 °C).

Läs den här snabbhandboken innan du utför ett test. Följ anvisningarna noggrant.



Steg 1: Slå PÅ analysinstrumentet. Kontrollera att hållaren till testremsorna är ren.



Steg 2: Doppa en remsa i urinprovet. Se till att testytorna blir fuktiga. Ta upp testremsan ur urinen efter ca 1 sekund. Stryk remsans långsida mot behållarens kant för att torka bort överflödig urin. Använd Medi-Test URYXXON® Stick 10 / Combi 7 L / Combi 5 L testremsor.



Steg 3: Vidrör kort (ca 1 sek) remsans långsida mot en absorberande pappersduk för att torka bort överflödig urin.



Steg 4: Placera testremsan i hållaren. Se till att testytorna vetter uppåt. Instrumentet startar automatiskt mätningen. Testremsan dras in i instrumentet efter 30 sekunder. Viktigt! Ta inte bort remsan från hållaren förrän mätningen har slutförts.



Steg 5: När mätningen har slutförts skrivs resultatet ut.



Steg 6: Kassera den använda testremsan. Torka bort eventuella urinrester.

Dagligt underhåll



Rengör hållaren med vatten och desinfektionsmedel en gång om dagen.



1. Dra ut hållaren och ta bort den från instrumentet.
2. Skölj hållaren med vatten.
3. Ta bort eventuella intorkade rester med en mjuk borste.
4. Torka av hållaren med 70 % alkohol eller annat lämpligt desinfektionsmedel. Torka av den med en mjuk trasa.
5. Sätt i hållaren i instrumentet.

Kvalitetskontroll

Testa negativa och positiva kontroller varje gång en ny förpackning med testremsor öppnas. Använd inte vatten som negativ kontroll.

Byta skrivarpapper



1. Öppna skrivarluckan genom att trycka på den mönstrade ytan bakom facket för pappersutmatningen. Ta bort den gamla pappersrullen.
2. Sätt i en ny pappersrulle som matas fram underifrån.
3. Rulla upp ca 10 cm papper.
4. Stäng luckan.



Teknisk service

Om du har frågor efter att ha läst igenom handboken, eller om du behöver teknisk hjälp, skall du kontakta:

Medic24 AB

E-post: info@medic24.se

Telefon: 033 23 00 99

