



Semi-permeabel film ¹

Absorberande hydrocellulärt skum

Sårkontaktlager med
vidhäftande silikon



 **smith&nephew**
ALLEVYN [◇]
Gentle Border

ALLEVYN^o Gentle Border är ett förband för sårbehandling med optimal vätskehanterande förmåga tack vare den unika trippelverkande teknologin som absorberar, bibehåller och släpper igenom sårvätska^{1,2}. Resultatet är en sårmiljö med optimal fuktbalans som främjar sårhäkning^{3,4}. Exempel på viktiga egenskaper hos ALLEVYN Gentle Border:

- Utmärkt formbarhet som säkrar patientkomfort⁴
- Mjuk vidhäftande silikongel som minimerar skada och smärta vid förbandsbyten – optimalt för patienter med skör hud^{4,6}
- Duschbart – förbandet kan sitta kvar när patienten duschar⁷
- Det översta filmlagret är en effektiv barriär mot bakterier – bidrar till att minska risken för infektion på grund av yttre kontaminering⁸
- Lätt att applicera och ta bort – kan tas bort och sättas tillbaka utan att förlora sina vidhäftande egenskaper⁶
- Olika former och storlekar som lätt kan formas efter kroppens konturer på ställen där det är svårt att applicera förband⁶
- ALLEVYN Gentle Border Heel bidrar till tryckavlastning när det används tillsammans med andra tryckavlastande produkter.

Indikationer

ALLEVYN Gentle Border är indicerat för behandling av sekundärläkande ytliga granulerande sår, svårläkta och akuta vätskande sår, full- och delhudssår som trycksår, fotsår hos diabetiker, bensår, maligna sår, infekterade sår, operationssår, tagställen, hudflikar samt första och andra gradens brännsår

Applicering

Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande hårväxt för optimal vidhäftning.

Ta bort en av skyddsfilmerna och applicera förbandets vidhäftande sida mot huden.

Ta bort den återstående skyddsfilmerna och stryk med handen över förbandet så att det ligger jämnt över såret utan att sträckas eller veckas. Förbandets skumdyna måste täcka hela sårets yta. Förbandet går att lyfta och applicera igen utan att det förlorar sin vidhäftande förmåga.

ALLEVYN Gentle Border kan klippas till för att passa hälar, armbågar och andra ställen där det är svårt att applicera förband. Använd alltid aseptisk teknik när du klipper i förbandet. Om förbandet har klippts till, se till att exponerade områden av skumdynan täcks med lämplig film men var noga med att inte täcka hela förbandet.

Bytesfrekvens

Under början av behandlingen bör ALLEVYN Gentle Border kontrolleras ofta enligt lokala kliniska riktlinjer. Om förbandet används på infekterade sår ska infektionen kontrolleras och behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer. Förbandet kan lämnas på plats i upp till sju dagar, förutom i Sacrum där det bör bytas inom fem dagar. Förbandet ska bytas när sårets och den omgivande hudens tillstånd motiverar det eller när sårvätska syns och närmar sig 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först. Tidpunkten för förbandsbyte bör bygga på klinisk bedömning och hänsyn bör även tas till lokala riktlinjer.

Borttagning av förbandet

För att ta bort ALLEVYN Gentle Border, lyft ett hörn av förbandet och dra långsamt tills hela förbandet har avlägsnats från såret.

Försiktighetsåtgärder

Använd inte ALLEVYN Gentle Border med oxiderande ämnen som hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel kan bryta ner det absorberande polyuretanet i förbandet. Om rodnad eller sensibilisering uppträder, avbryt användningen. ALLEVYN Gentle Border är endast avsett för engångsbruk. Enbart ALLEVYN Gentle Border Heel får inte användas för tryckavlastning utan ska kombineras med andra tryckavlastande produkter.

Beställningsinformation

Artikel nr	Storlek	Antal/fp
66800269	7.5cm x 7.5cm	10
66800270	10cm x 10cm	10
66800272	12.5cm x 12.5cm	10
66800273	17.5cm x 17.5cm	10
66800900	10cm x 20cm	10
66800959	17.1cm x 17.9cm Multisite	10
66800897	16.8cm x 17.1cm Sacral small	6
66801031	21.6cm x 23cm Sacral Large	10
66800506	23cm x 23.2cm Heel	5



ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.^o

Referenser

1. Data on file ref DS/09/013/R2. ALLEVYN Gentle Border Dressing Physical Properties. Daubney L. May 2009.
2. Smith & Nephew Wound Management Data on File report ref. 0711080. Absorption properties of ALLEVYN Gentle Border. Tompkins L. November 2007.
3. The clinical and physical properties of ALLEVYN Gentle Border dressing and the moist wound environment. Myers D, November 2007.
4. Hurd T *et al.*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK, 2009, Vol 5, No 3.
5. Smith & Nephew Wound Management, Data on file report reference OR-DOF/017.
6. Data on file: OR-DOF/001.
7. Data on File: OR-DOF/011.
8. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle Border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.
9. Technical Justification AGB006.