



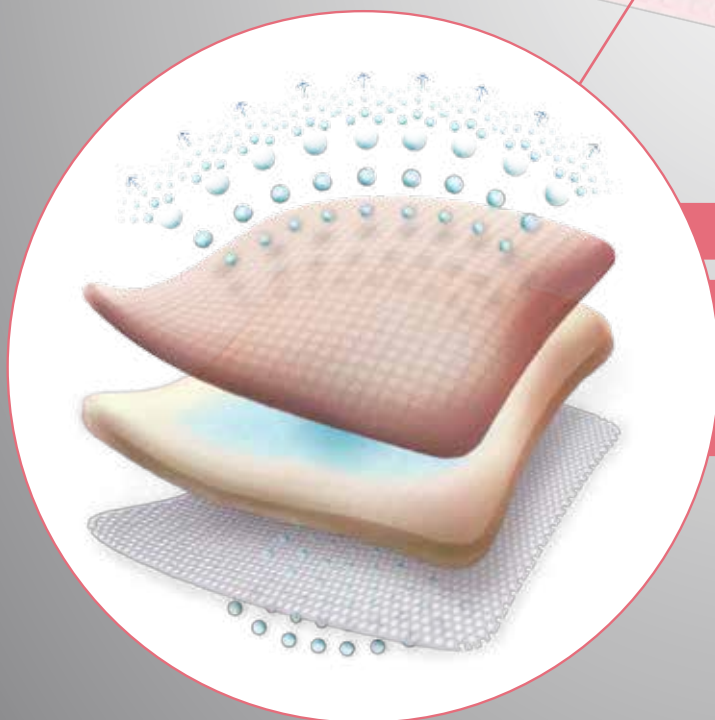

Semi-permeabel film¹

Absorberande hydrocellulärt skum

Sårkontaktlager med
vidhäftande silikon

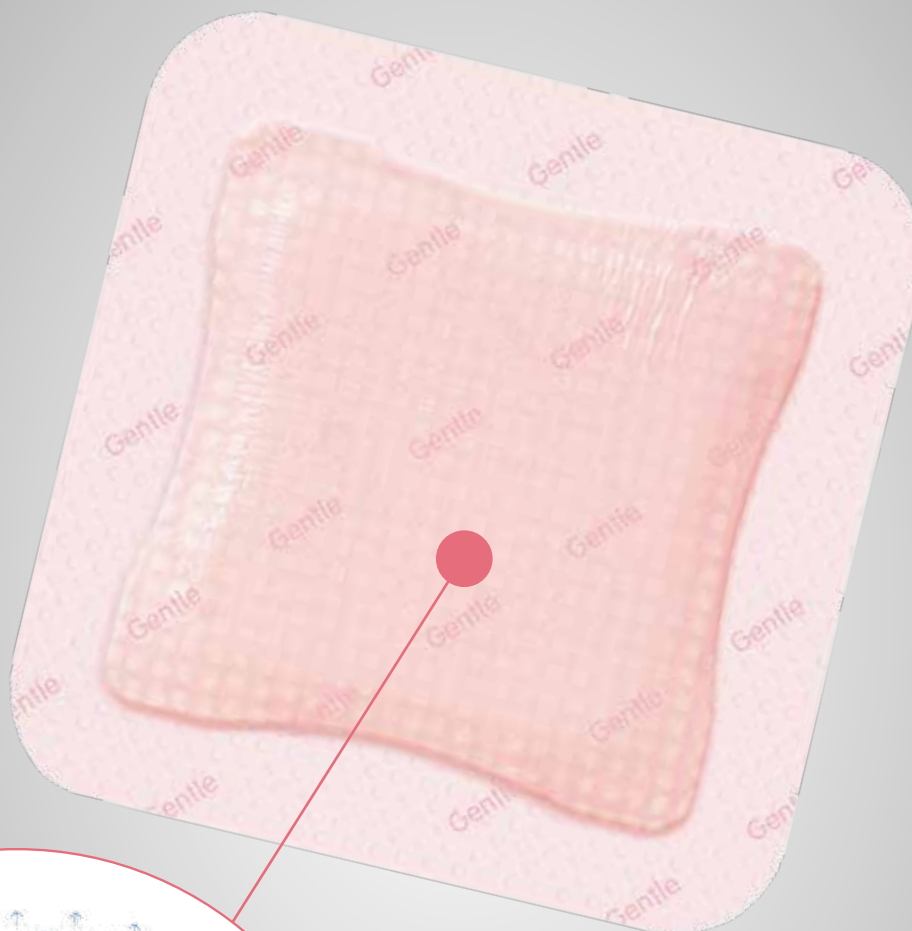

 **smith&nephew**
ALLEVYN[®]
Gentle Border Lite

ALLEVYN® Gentle Border Lite är ett förband som ger sårbehandling med optimal vätskehanterande förmåga tack vare den unika trippelverkande teknologin som absorberar, bibehåller och släpper igenom sårvätska^{1,2}. Resultatet blir en sårmiljö med optimal fuktbalans som främjar sårhäkning³. ALLEVYN Gentle Border Lite har en tunnare skumkärna men ger ändå samma fördelar som ALLEVYN Gentle Border:

- Utmärkt formbarhet⁴ som säkrar patientkomfort
- Optimal vätskehanterande förmåga tack vare den unika trippelverkande teknologin och vidhäftande silikongel⁶
- Formar sig lätt efter kroppens konturer på ställen där det är svårt att applicera förband⁵
- Enkel att applicera³ – kan lyftas och omplaceras utan att förlora sina vidhäftande egenskaper⁶
- Duschbart förband⁵ för att förbättra patientens livskvalité
- Sårkontaktlager av silikongel för att minimera smärta vid förbandsbyten³ - optimal för patienter med skör hud³
- Det översta filmlagret är en effektiv barriär mot bakterier – bidrar till att minska risken för infektion på grund av yttre kontaminering⁷

Indikationer

ALLEVYN Gentle Border Lite är indicerat för behandling av sekundärläkande lågt till måttligt vätskande, ytliga granulerande sår, svårläkta och akuta vätskande sår, full- och delhudssår som trycksår, fotsår hos diabetiker, bensår, maligna sår, infekterade sår, operationssår, tagställen, hudflikar samt första och andra gradens brännsår.

Applicering

Rengör såret enligt gällande riktlinjer. Välj ett förband av lämplig storlek. ALLEVYN Gentle Border Lite kan klippas till för att passa svårbandagerade områden. Använd alltid aseptisk teknik när du klipper i förbandet.

Rengör och avlägsna fukt från omgivande hud. Avlägsna omgivande hårväxt för optimal vidhäftning.

Ta bort en av skyddsfilmerna och applicera förbandets vidhäftande sida mot huden. Ta bort den återstående skyddsfilmerna och stryk med handen över förbandet så att det ligger jämnt över såret utan att sträckas eller veckas. Förbandets skumdyna måste täcka hela sårets yta. Förbandet går att lyfta och applicera igen utan att det förlorar sin vidhäftande förmåga. Om förbandet har klippts till, se till att exponerade områden av skumdynan täcks med lämplig film men var noggrann med att inte täcka hela förbandet.

Bytesfrekvens

Under början av behandlingen bör ALLEVYN Gentle Border Lite kontrolleras ofta enligt lokala kliniska riktlinjer. Om förbandet används på infekterade sår ska infektionen kontrolleras och behandlas enligt lokala kliniska riktlinjer. Förbandet kan lämnas på plats i upp till sju dagar, förutom i Sacrum där det bör bytas inom fem dagar. Förbandet ska bytas när sårets och den omgivande hudens tillstånd motiverar det eller när sårvätska syns och närmar sig 0,5 cm från förbandsdynans kant, beroende på vilket som inträffar först. Tidpunkten för förbandsbyte bör bygga på klinisk bedömning och hänsyn bör även tas till lokala riktlinjer.

Borttagning av förbandet

För att ta bort ALLEVYN Gentle Border Lite, lyft ett hörn av förbandet och dra långsamt tills hela förbandet har avlägsnats från såret.

Försiktighetsåtgärder

Använd inte ALLEVYN Gentle Border Lite med oxiderande ämnen som hypokloritlösningar (t.ex. Eusol) eller väteperoxid, eftersom sådana medel kan bryta ner det absorberande polyuretanutet i förbandet. Om rodnad eller sensibilisering uppträder, avbryt användningen. ALLEVYN Gentle Border Lite är endast avsedd för engångsbruk.

Beställningsinformation

Artikel nr.	Storlek	Antal/fp
66800833	5cm x 5cm	10
66800834	7.5cm x 7.5cm	10
66800835	10cm x 10cm	10
66800836	5.5cm x 12cm	10
66800837	8cm x 15cm	10
66800840	15cm x 15cm	10
66801012	10cm x 20cm	10
66801013	Oval 8.6cm x 7.7cm	10
66801014	Oval 15.2cm x 13.1cm	10
66801041	Multisite 8cm x 8.4cm	10

Wound Management
Smith & Nephew AB
Kråketorpsgatan 20
431 22 Mölndal

T +46 (0)31 746 58 00
F +46 (0)31 87 05 31

www.smith-nephew.com
sn@smith-nephew.com

*Varumärke tillhörande Smith & Nephew
™ Alla varumärken är godkända
© Smith & Nephew mars 2014
14-03872-SV



ALLEVYN - People first, outcomes follow

For patients. For budgets. For today.®

Referenser

1. Smith & Nephew Wound Management Data on File Report Reference DS/10/100/RI. ALLEVYN Gentle Border Lite Physical Properties. Tompkins L. August 2010.
2. Smith & Nephew Wound Management. Development Services Report Reference DS/08/043/S12. Stability Summary for ALLEVYN Gentle Border with wack er silicone adhesive. Carpenter S and Foster D. September 2008.
3. Hurd T *et al*, A multicentre in-market evaluation of ALLEVYN Gentle Border. Wounds UK 2009, Vol 5, No 3.
4. S.M.T.L Conformability Testing of Wound Dressings. Report 10/3328/1.
5. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/011.
6. Smith & Nephew Wound Management. Data on file report reference OR-DOF/01.
7. Smith & Nephew Wound Management. Report Ref: 1010016. Bacterial Barrier testing on samples of ALLEVYN Gentle and ALLEVYN Gentle border dressings with a 7 day test duration against S. Marcescens. October 2010.