



ULTRALJUDSGEL

AQUASONIC 100, Aquasonic CLEAR och SCAN

Beskrivning:

Aquasonic Clear ultraljudsgel är en osteril, vattenlöslig gel som inte lämnar fläckar och som endast är avsedd för utvärtes bruk och kan användas med alla kommersiellt tillgängliga ultraljudsenheter.

Indikationer för användning:

Kan användas på intakt, oskadad hud och på alla patienter på inrättningar där korskontaminering är en minimal risk. Kassera den tomma behållaren efter användningen.

Produkten är endast avsedd för utvärtes bruk och ska inte användas vid:

- Invasiva ingrepp där en enhet förs in genom vävnaden, t.ex. nålaspiration, nållokalisering, vävnadsbiopsi eller kirurgiska ingrepp.
- Procedurer på eller nära skadad hud, som ett operationsställe eller öppet sår.
- Patienter med immundefekt eller som genomgår immunsuppressiv behandling.
- Neonatala eller kritiskt sjuka pediatrika patienter.
- Slemhinnor.
- Kritiskt sjuka patienter eller patienter med kontakt-, luftburen eller droppöverföringsbaserad infektionskontroll.

Lagringsförhållanden

Förvaras svalt och torrt. Förvaras utom räckhåll för direkt solljus.

Varningar och säkerhetsföreskrifter

Kassera produkten om förpackningen är skadad eller om det finns tecken på kontaminering.

Används inte på patienter med känd känslighet för parabener.

För att undvika kontaminering ska behållarnas spetsar inte komma i kontakt med patient, personal eller instrument.

Applicera ultraljudsgel på transduktorns yta och inte direkt på patienten.

Art Nr: 10009750, 10005125, 10009749, 10001680