



# V.A.C.<sup>®</sup> Gel

## Produktinformation:

V.A.C.<sup>®</sup> Gel  
Dubbelhäftande hydrogelremsa

## Användningsområden:

Områden där det är svårt att fästa sårfilmen, t ex fuktiga områden, anatomiskt svåra områden eller ställen där det är små möjligheter att fästa drapen.

## Fördelar:


- Problemlösare när behov finns, säkerställer ett tätt V.A.C.<sup>®</sup> förband
- Mycket hudvänligt
- Enkel att använda
- Fungerar även på ett problematiskt underlag (t ex fukt, litet fästområde)

## Varför behövs den:

- Sår finns på många ställen som i dag behandlas med V.A.C.<sup>®</sup> Therapy. Med V.A.C.<sup>®</sup> Gel säkerställer du ett tätt V.A.C.<sup>®</sup> -förband även vid svåra förhållanden t ex när en stomi, ljumsksår, sår nära kroppsöppningar, fuktiga omgivningar eller nära en led mm.

## Så här gör du:

- V.A.C.<sup>®</sup> Gel ligger sterilförpackad med releaseplast på båda sidor
- Klipp till lagom storlek innan releaseplasten tas av
- Fästes på huden precis utanför V.A.C.<sup>®</sup> GranuFoam<sup>™</sup>-förbandet
- Fäst sårfilmen över V.A.C.<sup>®</sup> GranuFoam<sup>™</sup> förbandet och V.A.C.<sup>®</sup> Gelen

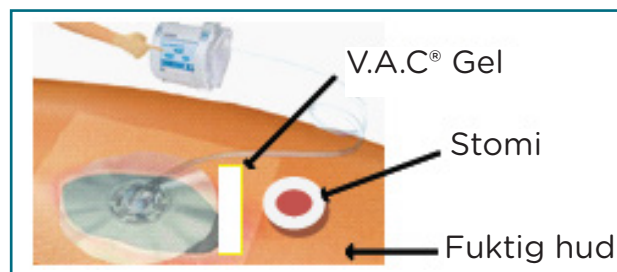

## Beställningsinformation

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Förp.
M6275026-10-A	Dubbelhäftande hydrogelremsa	140 x 30 mm	10

Leverantör



## För mer information / Order

Mediq Sverige AB, Hallabäcksvägen 1, 434 37 Kungsbacka  
Tel. 031- 388 91 10, [www.mediq.se](http://www.mediq.se), [marknad@mediq.com](mailto:marknad@mediq.com)