



Produktinformation

Indikationer

Navina Systems™ från Wellspect HealthCare har utvecklats för att hjälpa vuxna som lider av avföringsinkontinens, kronisk förstoppning och/eller tidskrävande tarmskötsel. Användaren kan vara rullstolsburen och/eller ha nedsatt motorisk funktion i händerna. Genom att tillföra vatten till nedre delen av tjocktarmen (kolon) kan man stimulera de peristaltiska musklerna i tarmen till att tömma tjocktarmen och ändtarmen (rektum).

Kontraindikationer




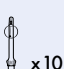



Använd inte Navina™ Classic-system om du har något av följande:

- Anal eller rektal stenosis
- Aktiv inflammatorisk tarmsjukdom
- Akut divertikulit
- Kolorektal cancer
- Ischemisk kolit
- Genomgått rektal operation för mindre än 3 månader sedan

- Genomgått endoskopisk polypektomi för mindre än 4 veckor sedan

Den här listan över kontraindikationer är inte fullständig, och därför tar sjukvårdspersonalen även ställning till individuella omständigheter.

Navina Classic-system

Referenser	Typ	Innehåll	Livslängd
6900510	Navina Classic-system 	1 Navina Classic-kontrollenhet 1 Vattenbehållare 1 vattenslangset 2 rektalkatetrar 1 Navina-väska	
6900610	Navina Classic-system - refill 	1 Navina Classic-kontrollenhet 1 vattenbehållare 1 vattenslangset 2 rektalkatetrar	
6900310	Navina Förbrukningsset 	1 vattenbehållare 15 rektalkatetrar	15 användningstillfällen Endast för engångsbruk
6894010	Navina Rektalkateterset 	10 rektalkatetrar	Endast för engångsbruk
6901110	Navina Vattenslangset 	1 kateterslang 1 slang till vattenbehållare	100 användningstillfällen 100 användningstillfällen
6901200	Navina Tillbehörssset 	2 greppringar (1 vertikal, 1 horisontell) 1 nackband 1 fästrem 1 fästklämma till Navina Smart-kontrollenheten	
6901310	Navina Classic-kontrollenhet 	1 Navina Classic-kontrollenhet	100 användningstillfällen

Alla Navina Classic-komponenter ska kasseras som hushållsavfall.

När tarmen fungerar, fungerar tillvaron

- Hydrofil engångskateter med rund spets för maximal komfort, hygien och säkerhet.
- Ballongens flexibla design försluter rektum och ser till att katetern sitter på plats med bra förslutning under hela behandlingen.
- Bra handtag med konnektor som gör utrustningen lätt att hantera.
- Ballongerna testas individuellt för optimal funktion och för att garantera en bra säkerhetsmarginal mellan maxupplåsning och sprickfärdig nivå.

ENGÅNGS- KATETER

VATTEN- BEHÅLLARE

- Liten, hopfällbar vattenbehållare för diskret förvaring och transport.
- Stadig och försedd med en skala som förblir korrekt även efter en längre tid.
- Enkel att fylla och tömma.
- Lätt att öppna och stänga även vid nedsatt styrka och funktion i händerna.
- Inbyggt lock (behöver ej monteras) som är försett med en tryckventil för extra säkerhet.

- De färgkodade vatten- och luftpumparna gör systemet lätt att förstå.
- Lätt att pumpa med eller utan att spännen fast enheten vid benet.
- Stora, intuitiva reglage.

MANUELL PUMP

SLANGAR

- Lätt att hålla i och hantera.
- Färgkodade, säkra konnektorer garanterar korrekt montering.
- Lätt att rengöra.