

Produktblad

895240 Självhäftande elektrod 5x9 cm

Självhäftande elektroder av mycket hög kvalitet.

De har en mycket bra självhäftande förmåga och kan användas till många behandlingar vid korrekt förvaring/skötsel.

Passar till alla olika fabrikat av apparater som har kabelstift i tjocklek 2 mm.
PVC och latexfria.

Fyra elektroder per förpackning.

Tips för bästa användning och hållbarhet:

- Rengör huden med tvål och vatten innan behandling och torka torrt. Ingen hudlotion, massageolja, smink eller liknande får finnas kvar på huden.
- Ta inte tag i kabeln vid borttagning från plastunderlaget utan håll försiktigt i elektrodkanten.
- Efter användning sätt tillbaka elektroden på On sidan på plastunderlaget.
- Vattenspraya försiktigt eller fukta med några vattendroppar om elektrodgelen är torr. Doppa aldrig ned hela elektroden i vatten.
- Förvara alltid elektroderna på plastunderlaget och i försluten påse samt förvara i rumstemperatur.
- Rekommenderat är att elektroderna enbart används till samma person
- Byt till nya elektroder när de är alltför slitna

