

Användarmanual

Siles Skyddsvisir



Skydd mot
droppsmitta och
andra vätskor






Art. nr:
ZSKYVIS0002

Siles Skyddsvisir

Lättanvänt ansiktsvisir för flergångsbruk som skyddar mot droppsmitta och stänk av t ex kroppsvätskor och andra lösningar. Glasklart visir bidrar till optimal sikt vid användning. Tillverkad i Sverige.

Montering av huvudband och visir:

1. Orientera huvudställningen så att den välvda delen av den främre skalmen pekar uppåt.
Montera visirbladet genom att fälla över visirbladets flikar över skalmens ytterkanter.
2. Dra igenom den tandade delen av huvudbandet inifrån genom det yttersta hålet.
3. Justera storleken efter behov så att huvudbandet sitter bekvämt och stadigt. Fäll in den tandade delen i det innersta hålet så att inga utstickande delar finns.

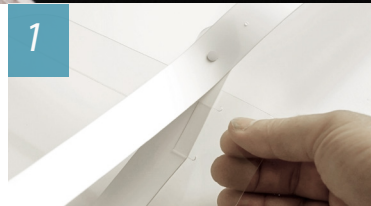



Denna bruksanvisning ska göras tillgänglig för varje användare.

Användning:

Placera huvudbandet mot pannan med skalmens välvda del uppåt. Placera så att baksidan ligger i centrum av bakhuvudet. Justera så att visiret sitter rakt framför ansiktet och så att det känns bekvämt att bära. Repigt eller skadat visirblad bör bytas ut.

Hantering

Produkten skall efter slutanvändning sorteras som plastavfall. Produkten bör förvaras i rumstemperatur och bör ej exponeras för direkt solljus.

Förväntad livslängd för produkten i obruten förpackning är mer än 10 år.

Rengöring och desinfektion av visir:

1. Desinfektera händerna med handdesinfektionsmedel.
2. Tag på skyddshandskar.
3. Rengör och desinfektera visirets plastdelar med rikligt med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med rengörande effekt. Bearbeta mekaniskt med torkpapper över hela ytan.

ⓘ Material som kommer i kontakt med användarens hud kan i sällsynta fall orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer.




Märkning huvudband:

 EN 166 3 S

Märkning visirblad:

 1 S

Märkning förklaring:

 = Identifiering av tillverkaren
– Plast Petter AB

1 = Optisk klass (1, 2 el. 3)

S = Förbättrad tålighet

EN 166 = Aktuell standard/metod.

3 = Användningsområde – skydd mot
vätska och stänk

Originaltillbehör/reservdelar:

Siles huvudställning, art nr. ZSKYVIS0002H

Siles visirblad, art nr. ZSKYVIS0002V

Siles skumremsa, art nr. ZSKYVIS0002S

Finns att beställa hos Plast Petter AB

OBS. endast dessa tillbehör får användas.

EU-försäkran om överensstämmelse finns att
ladda ner på www.skyddsvisir.se

Skyddet har typprovats och uppfyller kraven
enligt: EN166:2001. EU-typkontrollen är
genomförd av RISE Research Institutes of
Sweden AB, Box 857, SE-50115 BORÅS,
Anmält organ nr. 0402. Produkten uppfyller
kraven enligt PPER (EU)2016/425.