



Produktnamn: nutrisafe²[®]

Beskrivning: Diskbara enteralsprutor med säkerhetskoppling

Art.nr	Storlek	Avd.förp (st)	Transp.förp (st)
1012.01	1 ml	100	3200
1012.02	2,5 ml	100	3200
1012.05	5 ml	100	1600
1012.10	10 ml	100	1200
1012.20	20 ml	50	800
1012.60	60 ml	25	300

Material: Polypropylen och polyisopren

Övrig information: Diskbara enteralsprutor med säkerhetskoppling som omöjliggör felkopplingar med andra system tex luer-lock

Produkten är CE-märkt: Ja

Diskanvisning sprutor

Sprutorna kan användas under 7 dagar eller diskas 30 gånger. Skall diskas direkt efter användning. Använd varmt vatten och diskmedel.

- 1) Dra kolven in och ut flera gånger för att på så sätt skölja igenom sprutan med diskvattnet. Detta skall göras tills inga synliga rester av mat eller medicin finns.
- 2) Dra ut kolven från hylsan och tvätta båda dessa grundligt med varmt vatten och diskmedel. Viktigt att alla delar av sprutan: sprutspets, hylsa och kolv blir noggrant rengjorda.
- 3) Skölj hylsa och kolv under kallt kranvatten. Skaka ur överskottsvatten och torka därefter samtliga sprutkomponenter, insida och utsida, med rent hushållspapper.
- 4) Låt kolv och hylsa lufttorka innan de monteras ihop.

Ytterligare rengöring (vid behov)

Produkten tål även följande rengöring (komponenterna separerade)

- 1) Diskmaskin (endast 60ml sprutorna, Sprutspetsen uppåt)
- 2) Nedsänkta i kokande vatten (3 minuter)
- 3) Nedsänkta i kall steriliseringsvätska (Läs instruktionerna från tillverkaren av steriliseringsvätskan. Sprutkomponenterna får inte förvaras i steriliseringsvätskan)

Viktigt!

Sprutorna måste rengöras grundligt innan ovanstående processer genomförs.