



DAX Ytdesinfektion 75+

DAX Ytdesinfektion 75+ är avsedd för desinfektion av släta ytor t.ex. bänkar, bord och undersökningsbritsar. DAX Ytdesinfektion 75+ är effektiv mot bakterier, svampar och olika typer av virus som HIV, Hepatit B och C.

Fördelar med DAX Ytdesinfektion 75+

- 75 volymprocent alkoholstyrka, med etanol som huvudkomponent
- Verkar snabbt och effektivt utan att lämna spår på den behandlade ytan
- Innehåller tensid, vilket gör att ytan inte behöver förbehandlas
- Har dokumenterad effekt på bakterier, svampar och flera olika virus som t.ex. HIV, Murine Norovirus och Adenovirus.

Gör så här/Dosering:

- Dränk in en torkduk med utspädd brukslösning alternativt spruta direkt på ytan.
- Bearbeta ytan upprepade gånger.
- Lämna ytan lätt fuktig i slutet av inverknings tiden och låt lufttorka.
- Använd så mycket ytdesinfektionsmedel att ytan är fuktig under hela kontaktiden (se sidan 2 för kontaktid).



Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75+, 300 ml	494-24	7331964004944	24
DAX Ytdesinfektion 75+, 1000 ml	495-12	7331964004951	12

DAX Ytdesinfektion 75+

Mikrobiologisk information

Bactericidal effekt

EN 13727 Pseudomonas aeruginosa 30 sek
Staphylococcus aureus 30 sek
Enterococcus hirae 30 sek
Escherichia coli 30 sek

Yeasticidal effekt

EN 13624 Candida albicans 30 sek

Fungicidal effekt

EN 13624 A. Brasiliensis 15 min

Virucidal effekt

EN 14476 Adenovirus 30 sek
Murine Norovirus 30 sek
Limited Virucidal Efficacy

Typ av formulering

- Vätska

Förpackningsmaterial

- Högdensitetspolyeten (HDPE)

Produktnamn	Artikelnummer	EAN	Antal st/krt
DAX Ytdesinfektion 75+, 300 ml	494-24	7331964004944	24
DAX Ytdesinfektion 75+, 1000 ml	495-12	7331964004951	12