



Afinion™ analyzer cleaning kit

Art nr: 1116784

Varje förpackning innehåller 50 rengöringsspatlar.

Rengöringskitet (1116784) ska alltid användas för rengöring av kassettutrymmet.

Kassettutrymmet ska rengöras omgående om material eller vätskor spills i kassettutrymmet. För regelbundet underhåll (avlägsnade av dammpartiklar osv.) ska kassettutrymmet rengöras var 30:e dag.

Analysinstrumentet måste kopplas bort från strömförsörjningen innan rengöring.

Låt inte vätska droppa från rengöringstoppen och in i analysinstrumentet. Om vätska droppar in i analysinstrumentet kan optiken förstöras.

Sänk inte ned analysinstrumentet i vatten eller andra vätskor.

Flytta och luta inte analysinstrumentet när kassettutrymmet rengörs.

Rengöring:

- Tryck på för att öppna luckan.
- Koppla ur strömförsörjningen.
- Vät en rengöringstopp med 3 droppar vatten och rengör varsamt kassettutrymmet. -För att desinficera utsidan av analysinstrumentet, använd en 1:10 lösning av hushållsblekmedel (dvs. 0,5 % natriumhypoklorit), 2 % glutaraldehydlösning eller 70 % alkohollösning. Blötlägg inte.
- Avlägsna försiktigt spill och partiklar från kassettutrymmet med den fuktade rengöringstoppen.
- Analysinstrumentets yta ska exponeras för desinfektionsmedlet i minst 10 minuter.
- Torka bort eventuell kvarvarande vätska från kassettutrymmet med en ny, torr rengöringstopp.
- Anslut strömförsörjningen och slå på analysinstrumentet genom att trycka på PÅ/AV-knappen.
- Luckan stängs automatiskt under självtestet. Om den inte gör det, stäng luckan manuellt och starta om analysinstrumentet.

