

osom[®]

Strep A-test



STREP A-TEST




EGENSKAPER:

- ✓ **PRECISION 96 % känslighet;**
98 % specificitet mot kultur
- ✓ **SNABB;** Resultat på 5 minuter
- ✓ **PROV;** Halsprov
- ✓ **QC INVÄNDIGT;** Inkluderar ytterligare 2 tester för utvändig QC
- ✓ **TRÄNING;** Online-träning och -certifiering; www.osomtraining.com
- ✓ **KUNDVÅRD;** Teknisk support med certifierade medicintekniker+B10




TESTPROCEDUR/RESULTAT

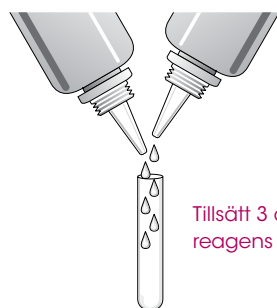

Tillsätt 3 droppar av reagens 1 och 2.


Stoppa i stickan och blanda.

10x

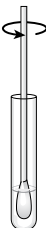

Låt stå i 1 MINUT.

Placera provstickan i det extraherade provet.

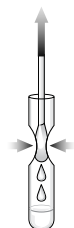

Ta ut stickan ur teströret.



Läs av resultaten efter 5 MINUTER



POSITIVT



NEGATIVT

| BESKRIVNING | KONFIGURATION | KATALOGNUMMER | FÖRVARING | CPT-KOD |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|---------|
| OSOM [®] STREP A-TEST | 50 TESTER + 2 TESTER FÖR QC | 141 OR 141E (CE-MÄRKT) | RUMSTEMP | 87880QW |
| OSOM [®] STREP A-TEST | 20 TESTER + 2 TESTER FÖR QC | 141E-20 (CE-MÄRKT) | | |

SEKISUI
DIAGNOSTICS

ISO 9001 Certified,
ISO 13485 Certified

SKANDINAVIEN
MediGroup Aps
Kajerødgade 38
DK-3460 Birkerød
Danmark
Web: www.osom.se
Email: info@medigroup.dk
Telefon: +45 4576 5425



TILLVERKAD I USA