



DES +45

Ytdesinfektion & rengöring (tensid)

Användningsområde

DES +45 är en isopropanolbaserad ytdesinfektion med rengörande verkan, dvs innehåller tensid. Produkten kan användas inom områden där mikrobiologisk smittspridning skall förebyggas och förhindras. Exempelvis vård & omsorg, laboratorieverksamhet eller motsvarande områden, där graden av renhet måste vara mycket hög. Avsedd för ytor kontaminerade med kroppsvätskor, blod osv. Innehåller tensid. Fri från Castor Oil.

Produktfakta

DES +45 innehåller 45 vol% isopropylalkohol med en tillsats av tensid för att få en rengörande effekt. DES+45 är godkänd för desinficering av Siemens Acuson ultraljudsgivare. Produkten uppfyller de europeiska normerna för desinfektionsmedel EN 1276, EN1650, EN 14348. EN13727, EN13697, SS-EN14561 och EN14562 (C. Albicans) och 4-field. EN 14476 Murine noro, Rota H1N1. Har effekt mot höljesförsedda virus som exempelvis Influenta A virus (H1N1, H5N1), Hepatit B & C, HIV samt vissa nakna virus som Murint Norovirus (surrogat till humant norovirus & Hepatit A-virus).

Art.nr:

17040001	Antal per kartong: 12* 1L	rundflaska med snäppkapsyl
17049300	Antal per kartong: 24* 300ml	platt flaska med snäppkapsyl
17040005	Antal per kartong: 3* 5L	dunk med skruvkork

Bruksanvisning

DES +45 används utspädd. Spruta ut rikligt med desinfektionsmedel på ytan (om stor) som skall desinficeras och stryk noggrant ut och bearbeta därefter ytan med en ren torkduk eller luddfritt papper.

Vid mindre ytor applicera på torkduken eller det luddfria pappret.

Det är viktigt att ytan är fuktig under hela verkningstiden, minimum 1 min. Ytan ska lufttorka. Använd skyddshandskar för att förhindra uttorkning av huden.

Dosering

Applicera flytande koncentrat flödigt på ytan eller på en torkduk. Generell verkningstid: 1-5min. Se etikettens baksida för detaljerad information.

Innehåll

Aqua, Isopropyl Alcohol, Cocamidpropylamine Oxide (=tensid)

Lagring och hållbarhet

3 års hållbarhet i öppnad förpackning. 12 månader efter öppnande.

Miljö

Tomma emballage ska sorteras som "förpackning av plast"

Ej helt tomma emballage ska sorteras som "farligt avfall"

