

Analyz Strep A Blue Line

— UTFÖRANDE —


PROVTAGNING av Analyz Strep A



Använd medföljande testpinnar som tillhör Strep-A kartongen. Var noga med att ta direkt på tonsillen.


1

Droppta 4 droppar av **Reagens 1** ned i röret.

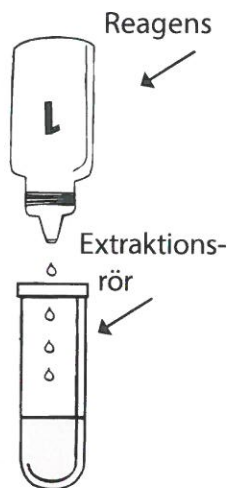

2


Droppta 4 droppar av **Reagens 2** ned i röret.

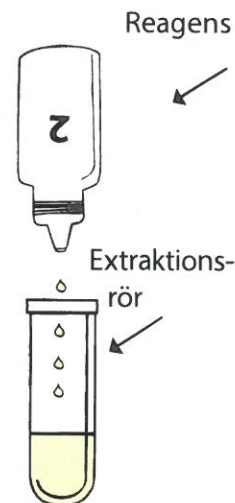

3



För provpinnen ned i röret. Snurra provpinnen 15 gånger och låt sedan stå **1 minut**.

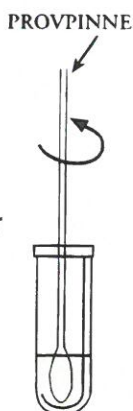

4

Pressa provpinnen hårt mot röret för att få ut så mycket vätska som möjligt.



5

Ställ ner testremsan i röret, minst 1 minut. Avläsning skall ske vid **5 minuter**, ej senare än 10 minuter.



— AVLÄSNING AV TEST

Så fort du ser en röd linje skall testet läsas som positivt.

Färgintensiteten kan variera.

Art.nr 75-75STREPA

