

QuikRead go[®] Strep A

Kort bruksanvisning



1 Ta halsprovet med den medföljande provtagningspinnen. **Placera** pinnen i extraktionsröret och tillsätt 2 droppar av reagens 1 (färglös) samt 2 droppar av reagens 2 (röd). Lösningen i röret ändrar färg till gul-orange.



2 **Rotera** pinnen i minst 30 sekunder och låt den stå ytterligare 1,5 minut (men inte längre än totalt 15 minuter). **Ta bort** folien på kyvetten. Vidrör ej den nedre flata delen av kyvetten.



3 **Luta** extraktionsröret och drag provtagningspinnen längs dess innervägg för att föra ner lösningen till kyvetten. Om en större volym vätska kvarstår i röret, håll det i kyvetten. Rör om kraftigt, lösningen blir röd. Lyft upp pinnen och **pressa ur** all vätska mot innerväggen av kyvetten.



4 **Förslut** kyvetten noggrant med en Strep A reagenskork. Tryck inte ner den inre rosa delen. När provet är tillsatt kan det förvaras i 4 timmar innan analys utförs. **Välj** Analysera på displayen.



5 **Sätt ner** kyvetten i mätbrunnen. Streckkoden ska vara vänd emot dig. På displayen visas hur mätningen fortskrider. **När** analysen är klar visas resultatet på displayen.

För utförlig metodbeskrivning, se inlagen i förpackningen.

Mer information: www.quikread.com

Se QuikRead go Strep A Test Procedure Video:

- » <http://www.oriondiagnostica.se/Produkter/QuikRead-go/QuikRead-go-Strep-A/>
- » youtube

QuikRead go[®] Strep A

Reagensförvaring



Reagenskit

Förvaring av öppnat kit i 2–25°C: till utgångsdatum



Öppnade kyvetter

Förvaring i 2–8°C: 6 månader

Förvaring i 18–25°C: 3 månader



Reagenskorkar, extraktionsreagens och kontroller

Öppnat rör/flaska i 2–25°C: 12 månader

Öppnat rör/flaska i 2–25°C: 12 månader




Öppnad kyvett

Utför testet inom **två timmar** efter att kyvetten öppnats. Låt bufferten bli rumstempererad innan testet utförs.

Provtagningsinstruktioner

När ett test utförs är det mycket viktigt att provtagningspinnen snurras i extraktionsröret och i kyvetten. Kom ihåg att pressa provtagningspinnen mot innerväggen när den tas upp ur kyvetten.

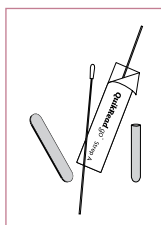


- 1** Ta fram allt du behöver för provtagningen: QuikRead go Strep A provtagningspinne, spatel och QuikRead go Strep A extraktionsrör.

Använd skyddskläder samt engångshandskar.


Använd QuikRead go provtagningspinnarna som följer med i kitet. Används andra provtagningspinnar kan svaret bli felaktigt, antingen positivt eller negativt.



- 2** Be patienten öppna munnen. Ta fram den sterila QuikRead go Strep A provtagningspinnen från förpackningen. Använd spateln för att trycka ner tungan och påbörja provtagningen.

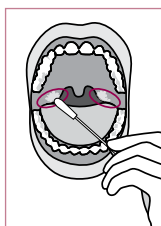

- 3** Roterar provtagningspinnen över tonsillerna på båda sidorna. Om prov tas någon annanstans kan det bli negativt resultat. Stora mängder saliv eller mikrober från andra delar av munnen kan störa testet.

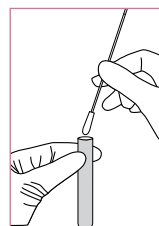

- 4** Ta bort provtagningspinnen från munnen och sätt ner den i ett extraktionsrör. Var försiktig med att komma i kontakt med andra ytor i munnen för att undvika kontamination med normalflora.

Försäkra dig om korrekt extraktion. Notera färgförändringarna. Färgerna indikerar korrekt pH både under extraktionen och neutralisationen. Följ de angivna tiderna.

Produkt	Art.nr
QuikRead go Strep A, 50 tester	135883
QuikRead go Instrument	135867



Orion Diagnostica Oy / Sverige
Box 520, 192 05 Sollentuna
Tel. 08-623 64 40, Fax 08-623 64 80
www.oriondiagnostica.se, www.quikread.com