



## MIC-KEY\* ENFit® kopplingslang/matslang "Tryck lätt & vrid"

### BILD 1

Vid bolusmatning med spruta med ENFit® koppling – sätt i sprutan i matslangen till MIC-KEY\* genom att trycka lätt och vrida medurs.

BILD 1



### BILD 2

För att koppla ihop MIC-KEY\* matslang med medicinport till ett nutritionsaggregat med ENFit® koppling, använd den raka porten till MIC-KEY\* matslang och koppla ihop genom att trycka lätt och vrida medurs.

BILD 2



Om sidoporten inte skall användas, kontrollera att locket är ordentligt stängt innan matning påbörjas.

 **HALYARD** (F.d. Kimberly Clark)

\* Registered Trademark or Trademark of Halyard Health, Inc. or its affiliates. ENFit® is a trademark of Global Enteral Device Supplier Association, Inc. [www.halyardhealth.co.uk](http://www.halyardhealth.co.uk).

## Daglig skötsel

- Kontrollera läget på MIC-KEY\* G gastrostomiport inför tillförsel av mat, mediciner och vätska enligt gällande rutiner. Kontakta patientansvarig läkare vid osäkerhet om läget. Spola alltid igenom med vatten innan tillförsel av mat och mediciner.
- Rengör matslangar till MIC-KEY\* efter varje användning med varmt vatten och diskmedel. Skölj igenom slangarna noggrant och låt dem lufttorka. Förvara slangarna i en förslutbar box. MIC-KEY\* kopplingslangar är engångsmaterial och ska bytas inom två veckor. Bytesintervallet varierar, ibland kan slangarna behöva bytas dagligen eller varje vecka beroende på möjlighet till rengöring, infektionskänslighet hos patienten, sjukdom eller av andra orsaker.
- MIC-KEY\* G är tillverkad i silikon. Silikon har en livslängd på ca 1-8 månader men det varierar, för de allra flesta är det normalt att materialet försvagas (på grund av magsaftens surhetsgrad, medicinering mm) efter 2-4 månader. Vår rekommendation är att man byter MIC-Key\* regelbundet var 2-3 månad för att undvika obehag vid byte eller att den åker ut ofrivilligt och orsakar onödigt besvär.

Läs mer och/eller beställ skriftligt material på: [www.gastrostomi.se](http://www.gastrostomi.se)

## MIC-KEY\* G gastrostomiport – originalet!

Med ENFit® koppling

STORLEK (YTTRE DIAMETER)	STOMALÄNGD CM	ART. NR.
12 Fr	Från 0,8 till 4,0	8140-12-cm
14 Fr	Från 0,8 till 5,0	8140-14-cm
16 Fr	Från 0,8 till 5,0	8140-16-cm
18 Fr	Från 0,8 till 5,0	8140-18-cm
20 Fr	Från 0,8 till 5,0	8140-20-cm
24 Fr	Från 1,5 till 5,0	8140-24-cm



## Tillbehör för MIC-KEY\*

MIC-KEY*	LÄNGD	ART. NR.
Kopplings slang med medicinport, vinklad 90°	30 cm	0141-12
Kopplings slang med medicinport, vinklad 90°	60 cm	0141-24
Kopplings slang med medicinport, vinklad 90°	5 cm	0142-02
Kopplings slang bolus-set, rak	30 cm	0143-12
Kopplings slang bolus-set, rak	60 cm	0143-24
Kopplings slang utan medicinport, vinklad 90°	30 cm	0144-12
Kopplings slang utan medicinport, vinklad 90°	60 cm	0144-24
Mätsticka, stoma	Ž	98460

