



# Certest Calprotectin

Antigentest för detektion av kalprotektin i feces

# Certest Calprotectin

Kalprotektin är en markör som indikerar ett inflammatoriskt tillstånd i magtarmkanalen.

Genom att bestämma kalprotektinnivåerna kan man differentiera mellan IBD och IBS (irritabel bowel syndrome) som har liknande symtom.

Kalprotektinnivåerna stiger vid IBD (Crohns sjukdom och ulcerös kolit). Vid IBS stiger kalprotektinnivåerna däremot inte. Kalprotektin förblir intakt i feces i upp till sju dagar vilket gör det till en bra markör för att diagnostisera gastrointestinala sjukdomar. Certest Calprotectin är ett tillförlitligt test som är lätt att använda för att följa patienters inflammatoriska tillstånd och behandlingsvar och för att förutsäga risken för recidiv.

## Skäl till varför man ska välja Certest Calprotectin som diagnostiskt verktyg:

- patientvänligt – noninvasivt test, inga kostrestriktioner
- tillförlitligt – specifikt för humant kalprotektin
- enkelt att använda – enkelt och hygieniskt analysförfarande
- snabba resultat – inom 10 minuter

## Tolkning av resultaten



A: Grön: Negativ Kalprotektin 50 ug/g  
B: Grön: Negativ Kalprotektin 200 ug/g



A: Grön/Röd: Positiv Kalprotektin 50 ug/g  
B: Grön/Röd: Positiv Kalprotektin 200 ug/g



A: Grön/Röd: Positiv Kalprotektin 50 ug/g  
B: Grön: Negativ Kalprotektin 200 ug/g



Ogiltigt resultat.

## Provtagningsförfarande för Certest Calprotectin:

Analysen bör utföras så snart som möjligt efter provtagningen. Proverna kan förvaras vid rumstemperatur eller i kylskåp i sju dagar före analys. Proverna kan frysas vid -20 °C i upp till sex månader. Proverna ska tinas till rumstemperatur före analys.



## Produkt

Certest Calprotectin 50 + positive control, 20 tester  
Certest Calprotectin 200 + positive control, 20 tester  
Certest Calprotectin 50+200 + controls, 20 tester

## Art.nr

CP820001FC  
CT882001FC  
CC882001FC

- Certest Calprotectin testkassetter, bruksanvisning, provtagningsrör med spädningssvetska för feces
- Förvaras vid 2–30 °C
- Detektionsgränser 50, 200 och 50+200 ug/g feces
- Detaljerad information om hur man utför analysen och tolkar resultaten finns i bruksanvisningen


## Patientanvisning

1. Ta av locket på provtagningsröret.
2. Stick in provtagningspinnen på fyra olika ställen i avföringsprovet.
3. Sätt tillbaka provtagningspinnen i röret och förslut röret med spädningssvetska och avföringsprov ordentligt. Skaka provtagningsröret.

## Testprocedur Certest Calprotectin 50+200


Testkassett, fecesprov och positiv kontroll ska rumstempereras före analys.

1

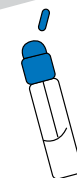


Skaka provtagningsröret med feces för att säkerställa att provet blandas ordentligt. Skär av locket ände.

2

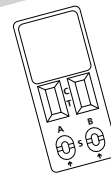

Ta fram CerTest Calprotectin testkassett ur den förseglade påsen. Använd ett provtagningsrör för varje prov respektive kontroll.

3

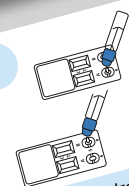

Dispensera 4 droppar i provfönstret. Läs av resultatet efter 10 minuter. Läs inte av testresultatet senare än 10 minuter

Utförlig instruktion för Calprotectin 50+200 finns i bruksanvisningen