


Snabbtest för missbruk av narkotika

# Drug Screen Test Panel

Patientnära urinprov

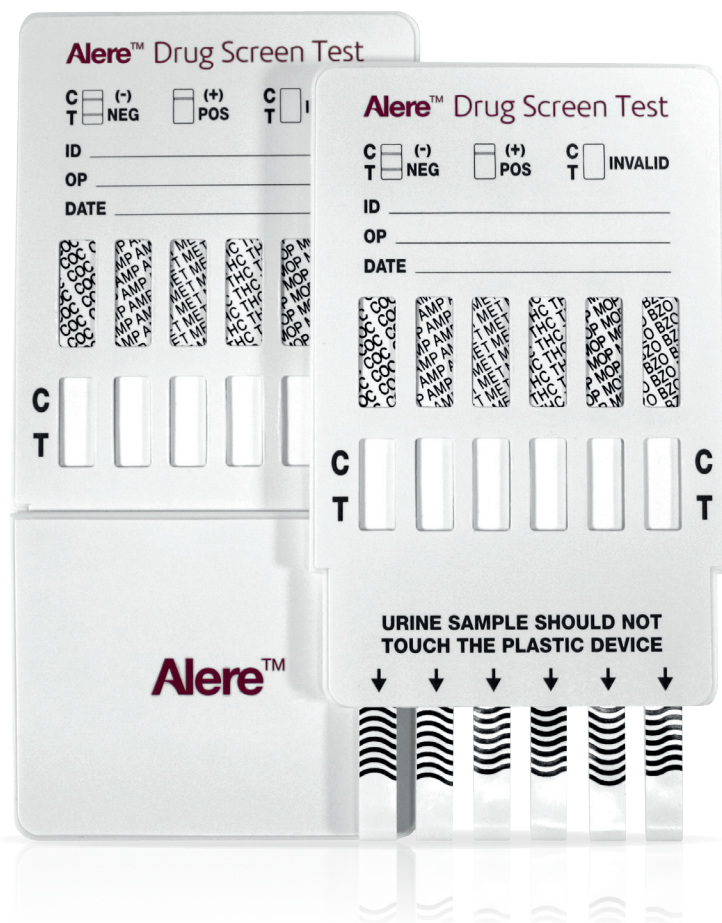

Bakom varje prov finns en **människa**

## Fördelar

- » Snabbt – resultat på fem minuter
- » Enkel testprocedur
- » Skyddande hylsa samt markering för hur djupt testpanelen kan doppas
- » Alternativt finns testpanel med integrerad manipulationskontroll
- » Plats för provlämnarens namn och personnummer
- » Förvaras i rumstemperatur (15-30°C)

## Material

- » Lådor med 25 separata förpackningar
- » Utrustningspaket för vidare laboratorieanalys finns för beställning

## Kompletterande Tjänster

Med Alere™ Toxicologys patientnära urinprover medföljer utbildning, kvalificerad teknisk support och omfattande korsreaktionsdata (information om vad, förutom detekterad narkotika, som kan ge positiva utslag).


## Hur det fungerar

PRODUKTUTBILDNING OCH CERTIFIERING FINNS ATT FÅ



Ta ut testpanelen ur skyddsfodralet och fyll i informationen.



Doppa provstickorna vertikalt i urinprovet.

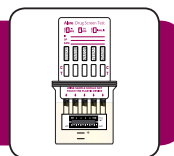

Sätt tillbaka hylsan för att täcka provstickorna. Läs av resultatet efter 5 minuter.

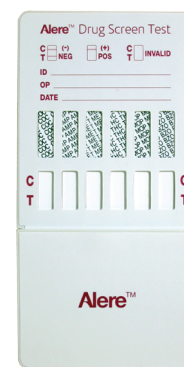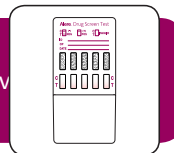

OBS rörande TESTPROCEDUR: Se bipacksedeln för fullständiga instruktioner, begränsningar och varningar.

## Detekterar Följande

Narkotiska Preparat	
Amfetamin	Metadon
Barbiturater	Metamfetamin
Bensodiazepiner	Morfin
Buprenorfin	Opiater
Cannabis (THC)	Oxycodone
Kokain	Fencyklidin (PCP)
Metadonmetabolit (EDDP)	Propoxifen
Ketamin	Tramadol
MDMA	Tricyklisk Syra