



SÅRBEHANDLING  
INTENSIVVÅRD  
STOMIVÅRD  
UROLOGI  
OPERATION  
FIXATION

# DuoDERM®

## Skonsam sårbehandling



DuoDERM® Mini förband är ett sårförband som används till ocklusiv, fuktighetsbevarande och effektiv sårbehandling av mindre sår med liten sekretion. I kontakt med sårvätska bildas en gel som bibehåller en fuktig sårmiljö vilket gynnar autolytisk upprensning och sårhäkning.

DuoDERM® Mini förband består av en vidhäftande, hydrokolloid massa som innehåller gelatin, pektin och natriumcarboxymethylcellulosa. Ovansidan är täckt av en polyurethanfilm/skum. DuoDERM® Mini förband är försedd med extra häftkant, vilket säkerställer bra vidhäftning. DuoDERM® Mini förband är vattentät och kan användas vid bad och dusch. Byten sker vid behov – minst en gång per vecka. Värm gärna plattan med händerna före applicering på såret och se till att huden är torr för bästa fästförmåga.



**ConvaTec**


Realise the possibilities™



## DuoDERM® förband "originalet" bland hydrokolloida förband

DuoDERM Mini förband ger en ocklusiv, fuktighetsbevarande och effektiv sårbehandling för mindre sår med liten sekretion. Ocklusivt fuktighetsbevarande sårsläkning ger följande dokumenterade fördelar:

- Främjar sårsläkning<sup>1</sup>
- Främjar sårets upprepning<sup>1</sup>
- Understödjer granulation och celledelning<sup>1</sup>
- Mindre infektionsfrekvens i jämförelse med traditionell behandling<sup>2</sup>
- Skadar inte eller har annan negativ effekt på nybildad vävnad<sup>3</sup>
- Skapar en bakterie- och virusbarriär.<sup>4</sup>

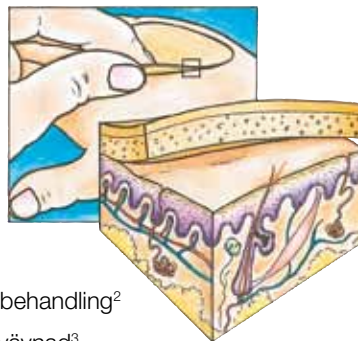

## REFERENSER:

1. Jones VJ. The use of gauze: will it ever change? Int. Wounds J. 2006;3:79-86
2. Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. Am J Infect Control. 1990;18:257-268.
3. Friedman SJ, Su WPD. Management of leg ulcers with hydrocolloid occlusive dressing. Arch Dermatol. 1984;120:1329-1336.
4. Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. Wounds. 1993;5:1-8.

### DuoDERM® Mini förband

Storlek  
5 x 5 cm

Förp.  
50 st

Varunummer  
281451



## FAKTA

### DuoDERM Mini förband

DuoDERM Mini förband är en steril, självhäftande tvåskiktspatta som innehåller pektin, gelatin och natriumcarboxymetylcellulosa (CMC). Ovansidan är täckt av en polyurethanfilm/skum. DuoDERM Mini förband är försedd med extra häftkant, vilket säkerställer bra vidhäftning.

## INDIKATIONER

Använd DuoDERM Mini förband till mindre sår med liten sekretion. Plattan kan med fördel användas vid skrap-, skrub- eller brännskador på svårbehandlade områden som händer, fötter, rygg och höfter samt vid små kirurgiska ingrepp som laparoskopisk kirurgi eller biopsier.

## BYTESINTERVALL

Förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller bytes när förbandet är mättat.

## FÖRVARING / HÅLLBARHET

Förvaras torrt i rumstemperatur  
Hållbarhet i 5 år.

## STERELISERINGSMETOD

Gammasteriliserad.

## KLASSIFICERING

DuoDERM Mini förband är CE-märkt och tillfredställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

För mer information se bruksanvisning.



**ConvaTec**

*Realise the possibilities™*

ConvaTec (Sweden) AB  
Box 15 138  
167 15 Bromma  
Sweden  
ConvaTec kundservice:  
Tel: 020-21 22 22  
Fax: 08-704 89 98  
E-mail: [convatec.kundservice@convatec.com](mailto:convatec.kundservice@convatec.com)  
[www.convatec.com](http://www.convatec.com)