

Förbandet som signalerar byte



DuoDERM[®] Signal[™] förband är ett ocklusivt, absorberande förband som kan användas för mindre till måttligt vätskande sår. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårhäkningsprocessen. DuoDERM Signal har en visuell bytesindikator som signalerar byte. Resultatet blir en lägre bytesfrekvens och en kostnadseffektiv sårbehandling.

SKAPAR EN FUKTIG SÅRLÄKNINGSMILJÖ

I kontakt med såravtäcka bildas en gel som främjar sårläkning och autolytisk debridering av devitaliserad vävnad, till exempel fibrin och nekroser.



GYNNSAMM SÅRLÄKNINGSMILJÖ
Gel som skapar en fuktig sårläkningssmiljö. DuoDERM Signal bevarar en fuktig sårmiljö och avlägsnas enkelt från såret.



YTA MED LÅG FRIKTION
Minimererar att förbandet krullar eller rullar ihop sig i förtid.



VISUELL BYTESINDIKATOR
Signalerar byte och minimerar möjligheten till för tidiga förbandsbyten.

BEHAGLIG FÖR PATIENTEN

DuoDERM® Signal™ bildar gel i kontakt med såravtäcka, och är därför lätt att ta bort utan att orsaka obehag för patienten.

ENKEL ATT ANVÄNDA

DuoDERM® Signal™ appliceras med en marginal på 3 cm utöver sårkanterna. Förbandet är genomskinligt, vilket innebär att det är lätt att inspektera såret. Finns i flera olika storlekar, även för häl och sakrum. Vid torra sår kan DuoDERM® Hydrogel® användas i såret och DuoDERM® Signal™ som täckförband. Vid djupare sår kan kaviteten fyllas ut med AQUACEL® Hydrofiber® förband.



DuoDERM® Signal™

Storlek	Antal/förp	Kod	Varunummer
10 x 10 cm	5	403326	811680
14 x 14 cm	5	403327	811681
20 x 20 cm	5	403328	811682
18,5 x 19,5 cm (häl)	5	410500	811683
20 x 22,5 cm (sakrum)	5	410501	811684



FAKTA

DuoDERM® Signal™ förband är en tunn självhäftande platta som består av gelatin, pektin, natriumcarboxymethylcellulosa (CMC) och syntetiska elastomerer.

INDIKATIONER

DuoDERM Signal används för mindre till måttligt våtskande sår, t ex trycksår (stadie I-II), bensår, skrubbsår, diabetessår, kirurgiska sår, delhudsbrännskador, tagställen, skrubbsår och skavsår.

BYTESINTERVALL

Upp till sju dagar eller så byts förbandet när det är mättat.

FÖRVARING

Förvaring sker torrt i rumstemperatur

STERILISERINGSMETOD

Gammasteriliserad

KLASSIFICERING

DuoDERM Signal är CE-märkt och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav

HÅLLBARHET

5 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen.

 **ConvaTec**
A BristoMyers Squibb Company

ConvaTec, Box 15200, 167 15 Bromma
Kundservice: 020-21 22 22
Fax: 08-704 89 98
www.convatec.com
convatec.kundservice@bms.com