

## Skonsam sårläkning



DuoDERM® Extra Thin förband är ett ocklusivt, absorberande förband som kan användas för torra till mindre vätskande sår. I kontakt med sårvätska bildas en fuktig gel som bibehåller en fuktig sårmiljö och gynnar sårläkningen<sup>1</sup>. DuoDERM® Extra Thin förband är en självhäftande platta som skapar en bakterie- och virusbarriär<sup>2,3</sup>, följsam och kan klippas till önskad passform. Förbandet klippas till efter behov och bör fästas 2 cm ut på den friska huden. Förbandet finns också som postoperativa storlekar och kan användas som primär- och sekundärförband.



## Hygien

– bakterie- och virusbarriär<sup>2,3</sup>. Du kan tvätta dina händer med förbandet på

## Sårhäkning

– skapar optimal miljö för sårhäkning<sup>1</sup>


## Väldokumenterat

– DuoDERM familjen är en av världens bäst dokumenterade sårförband

## Klippguide för DuoDERM

### Tips vid användning:

- värm plattan med händerna innan den appliceras på såret
- applicera DuoDERM med en marginal på 2 cm utöver sårkanterna
- se till att huden är torr innan plattan appliceras
- vid måttligt till kraftigt vätskande sår kan DuoDERM kombineras med AQUACEL® Hydrofiber® förband
- förbandet kan sitta upp till 7 dagar eller så byts det när det är kliniskt indikerat

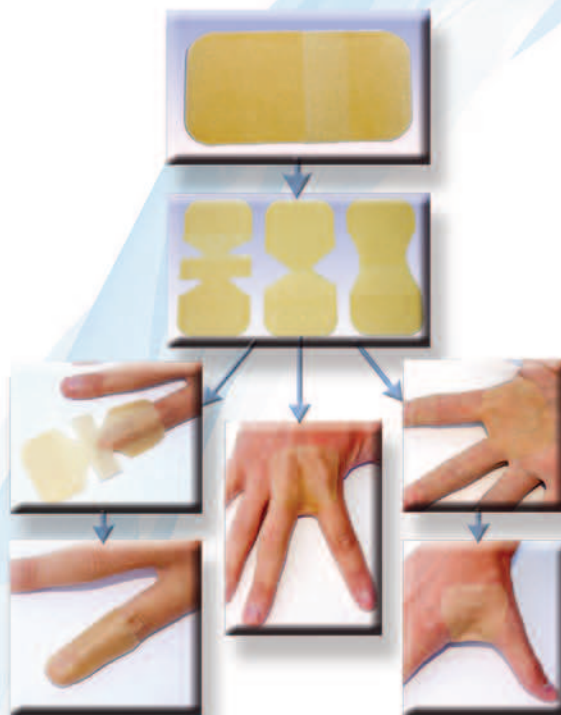

### DuoDERM® Extra Thin

STORLEK	FÖRBAND/FÖRP	KOD	BEST.NR
10 x 10 cm	20	401807	281501
10 x 15 cm (oval)	5	651008	281519
7,5 x 7,5 cm	5	H7951	293159
10 x 10 cm	5	H7954	293191
15 x 15 cm	5	H7956	293209
5 x 10 cm	10	H7959	281543
5 x 20 cm	10	H7961	281550
9 x 15 cm	10	187920	810966
9 x 25 cm	10	187921	810967
9 x 35 cm	10	187922	810968

Referens: **1.** Demetriades D, Psaras G. Occlusive versus semi-open dressings in the management of skin graft donor sites. *S Afr J Surg.* 1992;30:40-41. **2.** Bowler PG, Delargy H, Prince D, Fondberg L. The viral barrier properties of some occlusive dressings and their role in infection control. *Wounds.* 1993;5:1-8. **3.** Hutchinson JJ, McGuckin M. Occlusive dressings: A microbiological and clinical review. *Am J Infect Control.* 1990;18:257-268.

© 2006 E.R. Squibb & Sons, L.L.C.

® Varumärken tillhörande E.R. Squibb & Sons, L.L.C. ConvaTec är en auktoriserad användare.

## FAKTA

### DuoDERM® Extra Thin

DuoDERM Extra Thin är en tunn självhäftande platta som består av en undersida av hydrokolloider i en vidhäftande massa och en ovsida av polyurethanfilm. Den vidhäftande ytan innehåller elastomera polymerer som förstärker förbandets möjlighet att behålla sårexudat.

### Indikationer

DuoDERM Extra Thin används för torra till mindre vätskande, t ex trycksår (stadie I-II), bensår, diabetessår, kirurgiska sår, delhudsbrännskador, tagställen, skrubbsår, skavsår och ocklusionsbehandling vid dermatoser t ex eksem och psoriasis.

### Bytesintervall

Upp till sju dagar eller så byts förbandet när det är mättat.

### Förvaring

Förvaring sker torrt i rumstemperatur. Undvik starkt ljus.

### Steriliseringsmetod

Gammasteriliserad.

### Klassificering

DuoDERM Extra Thin är CE-märkt och tillfredsställer relevanta miljö- och säkerhetskrav.

### Hållbarhet

5 år.

För ytterligare information se bruksanvisning i förpackningen



ConvaTec, Box 15 200, 167 15 Bromma  
Kundservice: 020-21 22 22  
Fax: 08-704 89 98  
e-mail: convatec.kundservice@bms.com  
www.convatec.com