

# Proxident Bitstöd



**Proxident Bitstöd** avlastar trötta käkar och underlättar för den som utför munvård på någon annan.

---

## **Benämning**

Proxident Bitstöd

## **Artikelnummer**

3650 small, transparent, 3650-1 small, blå

3651 large, transparent, 3651-1 large, blå

## **EAN-kod**

7392380000637 small

7392380000644 large

## **Beskrivning**

Proxident Bitstöd används av sjukvårdspersonal och anhöriga som utför munvård på personer som har svårt att gapa. Bitstödet avlastar trötta käkar och underlättar för den som utför munvården. Proxident Bitstöd finns i två storlekar (small och large) och i transparent eller blå färg. Proxident bitstöd är tillverkat av polykarbonat. Materialet är anpassat för medicinska produkter och har bra värden för de flesta typer av påfrestningar och är mycket slagsegt.

## **Rengöring**

Rengör Proxident Bitstöd i destilleringsvätska eller i diskmaskin (max 90° C). Vid daglig användning ska bitstödet bytas ut en gång per månad (max 30 diskningar) eller tidigare om det börjar se slitet ut.

## **Ingredienser/innehåll**

Polykarbonatplast

## **Registrering**

Produkten är registrerad som en Medicinteknisk produkt klass 1 LVFS 2003:11.

## **Förpackning**

Påse av polyeten samt ryttare av kartong.

# Proxident

Box 470 SE-791 16 Falun, Sweden office phone +46 23 79 22 22 fax +46 23 79 22 01 info@proxident.se www.proxident.se VAT no 556867-5564

