

SPONGOSTAN®

Resorberbart hemostatikum



Beskrivning: SPONGOSTAN® är ett gelatinbaserat hemostatikum, som består av torkad gelatinskum. SPONGOSTAN har ett neutralt pH, varför det kan användas som bärare för läkemedel. Trombocyterna aktiveras och fastnar i gelatinsudden när SPONGOSTAN placeras på det blödande stället. Trombocyterna har en viktig funktion i frigörandet av aggregationsinducerande substanser. Flera kedjereaktioner leder till att lösligt cirkulerande fibrogen konverteras till fibrin. SPONGOSTAN skapar en barriär tillsammans med fibrinet vilken stoppar blödning inom 2-10 minuter. SPONGOSTAN resorberas fullständig inom 4-6 veckor. SPONGOSTAN absorberar 50 gånger sin egen vikt och kan lämnas kvar in situ.

Användningsområde: SPONGOSTAN används för att kontrollera diffusa mindre blödningar, där ligatur, sutur är svår eller opraktisk att använda.

Bruksanvisning: SPONGOSTAN kan användas torr eller genomfuktad i fysiologisk koksaltlösning, som pressas ut innan applicering. Tryck SPONGOSTAN lätt mot den blödande ytan under en kort tid och tills blödningen upphört. SPONGOSTAN kan lätt klippas till önskad storlek.

Om SPONGOSTAN används torr, bör den pressas samman före appliceringen till den blödande ytan. Alltför tät packning bör undvikas. Vid användning i närvaro av infektion, SKALL SPONGOSTAN TAS BORT efter det att blödningen stillats.

Steriliseringsmetod:

Torrluftsterilisering.

Hållbarhet: 4 år i rumstemperatur, förvaras torrt. FÅR EJ RESTERILISERAS

Art nr	Storlek	Antal st/ avd.förp.	Minsta försäljn.enhet, st
MS0001	200x70x0,5 mm	20	20
MS0002	70x50x10 mm	20	20
MS0003	70x50x1 mm	20	20
MS0004	80x30 dia mm	20	20
MS0005	10x10x10 mm	24	24

