

## Cellona® gipsbinda

### Överlägset finkrämig högvärdig gipsmassa

Cellona® gipsbindor är lindade på specialhylsor, vilka genomfuktas snabbt och jämnt med kort dopningstid. Gipset är genom sin finkrämighet mycket lätt att modellera.

#### Dopptid och torktid:

Dopptiden är 1 sekund/meter binda. Torktiden uppgår till 3 1/2 minuter vid en vatten temperatur på 20°C.

#### Belastning:

Efter 30 min kan man belasta gipset och transportera patienten. Efter 24 timmar kan man belasta gipset fullt ut.

#### Material:

Gasväv av 100% blekt bomull belagd med kalciumsulfathemihydrat (CAS-nummer: 10034-76-1)

#### Förpackningar:

Bindorna är förpackade i plastförpackningar med 5 st/fp

**Cellona® kalkgips** finns också som 4-lagriga skenor – Cellona splints.



| Storlek (cm x m)          | Art.nr | Avd.fp | Trp.fp |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 5cm x 2,7m                | 91380  | 12     | 96     |
| 6cm x 2m                  | 25400  | 60     | 60     |
| 8cm x 3m                  | 25411  | 40     | 40     |
| 10cm x 3m                 | 25412  | 40     | 40     |
| 12cm x 3m                 | 25413  | 40     | 40     |
| 15cm x 3m                 | 25414  | 40     | 40     |
| 20cm x 3m                 | 25415  | 30     | 30     |
| 40cm x 5m                 | 20301  | 1      | 10     |
| 60cm x 5m                 | 20302  | 1      | 10     |
| 80cm x 5m                 | 20303  | 1      | 10     |
| <b>Splints (4-lagers)</b> |        |        |        |
| 10cm x 20m                | 25500  | 1      | 1      |
| 12cm x 20m                | 25501  | 1      | 1      |
| 15cm x 20m                | 25502  | 1      | 1      |
| 20cm x 20m                | 25503  | 1      | 1      |

**Var god se bipacksedel för ytterligare information.**