

## Produktfaktablad TENA Lady Normal, Extra, Super

### Användningsområde

TENA Lady Normal, Extra och Super är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage.



### Produktegenskaper

TENA Lady Normal, Extra och Super har dubbla kärnor som absorberar urinen snabbt, sprider och lagrar den i botten av skyddet. Det gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar.

TENA Lady Normal och Extra är försedda med mjuk sidoelastik och TENA Lady Super har en mjuk längsgående trådelastik. Detta skålformar produkterna och bidrar till god komfort och passform, vilket ökar läckagesäkerheten. Ett mjukt yskikt närmast huden (Silky Softness) och andningsbart spärrskikt som är klätt med textilliknande nonwoven ger god komfort och hudhälsa.

Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred längsgående tejprensa på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produkt-namn/storlek.



## Produktfaktablad TENA Lady Normal, Extra, Super

TENA Lady								
Uppsugningsnivå/ storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/påse st	Antal/kart st	Antal.kart halvpall	ISO 11948-1 Absorptions kapacitet	Essity Art.nr
Normal	27,5	10,6	15,6	30	360	18	306	76 14 80
Extra	34	12,1	25,1	30	240	16	531	76 15 80
Super	43	20,1	43	30	180	12	939	76 17 15



Snabbt absorberande kärna  
för en torr yta



Odour Control™ hjälper till att  
förhindra oönskad lukt

### Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet.

Fäst skyddet i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.



TENA Lady

*Tillsammans gör vi skillnad*

## Produktfaktablad TENA Lady Normal, Extra, Super

### Ingående material

#### YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

#### GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

#### ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

#### SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

#### ELASTIK

Material: Polyuretan, polyisopren (Super)

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

#### SPÄRRSKIKT

Material: Permeabel polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

