

Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

Användningsområde

TENA Lady Super är läckagesäkra, bekväma och diskreta skydd för medelstora urinläckage.



Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

Produktegenskaper

TENA Lady Super har dubbla kärnor som absorberar urinen snabbt, sprider och lagrar den i botten av skyddet. Det gör att ytan känns torr och risken för läckage minskar.

TENA Lady Super har en mjuk långsgående trådelastik. Detta skålformar produkten och bidrar till god komfort och passform, vilket ökar läckagesäkerheten. Ett mjukt yskikt närmast huden (Silky Softness) som är klätt med textilliknande nonwoven ger god komfort och hudhälsa. Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt.

Skyddet fixeras enkelt i åtsittande trosa och sitter säkert på plats, utan att lämna häftrester på textilier, med en bred långsgående tejprens på produktens baksida. Skyddspappret är märkt med produkt-namn/storlek.

TENA Lady									
Uppsugningsnivå/ storlek	Längd cm	Bredd cm	Vikt g	Antal/ påse st	Antal/ kart st	Antar kart/ halvpall	Praktisk absorp- tion	ISO 11948-1 Apsorptions kapacitet	Essity Art.nr
Super	43	20,1	43	30	180	12	313	890	76 17 30



Snabbt absorberande kärna för en torr yta



Odour Control™ hjälper till att förhindra oönskad lukt

Användarinstruktion

Dra bort skyddspappret från baksidan av skyddet.

Fäst skyddet i åtsittande trosa eller fixeringsbyxa. Se till att skyddet behåller sin skålform.

Vik ihop skyddet efter användning och kasta enligt gällande avfallshänvisning.



Produktfaktablad TENA Lady Super (ej andningsbar)

Ingående material

YTSKIKT

Material: Non-woven

Funktion: Torrhet/mjukhet mot huden

GENOMSLÄPPSSKIKT

Material: Vadd av polypropylen och polyester

Funktion: Släppa igenom urin snabbt så att ytan hålls torr

ABSORBTIONSKÄRNA

Material: Cellulosamassa och superabsorbenter

Funktion: Sprida, absorbera och lagra urin

SUPERABSORBENT

Material: Polyacrylat

Funktion: Magasinera urin, fördröja bakterietillväxten vilket minskar risken för att oönskad lukt uppstår

ELASTIK

Material: Polyuretan, polyisopren (Super)

Funktion: Komfort, läckagesäkerhet och skålform

SPÄRRSKIKT

Material: Polyetenfilm (PE)

Funktion: Hindra genomvätning

För samtliga TENA Lady skydd gäller att följande material/ämnen inte har tillsats produkterna: naturgummi (latex), PVC, kolofonium, doftämnen, hudvårdande medel eller parfym. Produkterna kan användas tre år efter tillverkningsdatum. Lagras under normala förhållanden och bör ej utsättas för extrema temperaturer eller väta. Produkterna är CE-märkta.

Kontakta oss för mer information

☎ 020 27 20 20

✉ tena.nu@essity.com

🌐 tena.nu

📘 facebook.com/TENASverige



TENA
an Essity brand

