

Starta sårhäkningsen  
återfukta och absorbera....



**Purilon**  
hydrogel

[www.selefa.se](http://www.selefa.se)

**Purilon**



# Återfukta och absorbera

Nekrotisk vävnad fördröjer läkningsprocessen i ett sår. För att ett sår skall granulera och läka är det nödvändigt att sårbottnen är ren. Man bör därför ta bort nekrotisk vävnad och fibrinbeläggningar. Kombinationen av återfuktande och absorberande egenskaper i **Purilon Gel** underlättar detta. Den återfuktat såret när det är behov och absorberar nedbruten vävnad och exudat när det är nödvändigt.

## Hur fungerar det?

**Purilon Gel** innehåller renat vatten, natrium carboxymethylcellulosa och kalciumalginat. Frånvaron av konserveringsmedel minimerar risken för biverkningar. Gelen är också fri från propylenglykol vilket kan orsaka hudirritation.<sup>1</sup>

Alginater är en naturlig produkt utvunnet ur brunalger från havet. De innehåller naturliga antibiotiska bakteriedödande ämnen och stärker kroppens motståndskraft. **Purilon Gel** innehåller alginater och kan hjälpa kroppen på ett naturligt sätt att påskynda sårhäkningsprocessen.

Även om såret är i ett vertikalt läge, rinner inte gelen. Den är sammanhängande och tjockflytande vilket förhindrar maceration och läckage. Även efter att ha absorberat nedbruten vävnad och sårvätska kommer gelen att vara sammanhängande.

## Indikationer

**Purilon Gel** är primärt avsett för behandling av nekrotiska och gulsmetiga sår såsom kroniska bensår, trycksår, icke infekterade diabetesfotsår (kan dock användas även på infekterade sår men då under uppsikt av läkare) och övriga sår som behöver hjälp att skapa en fuktig läkningsmiljö.

## Kontraindikationer

Obehandlad sårinfektion. Torra, svarta nekroser på diabetesfotsår. 3:e gradens brännskador.

## Användning


Rengör såret och torka försiktigt den omgivande huden.

Tag av etiketten runt dragspelsförpackningen för att den ska fungera. Fyll inte såret med mer gel än till kanten på den omgivande huden. Täck gelen med ett sekundärbandage.

På torra nekroser, byt **Purilon Gel** varannan dag. På nekroser/fibrinbeläggningar som vätskar måttligt/kraftigt byt dagligen till var 3:e dag.

**Läs alltid bipacksedeln i förpackningen innan du använder produkten 1:a gången.**

## Purilon Gel finns i följande varianter och storlekar

Purilon Gel	Antal/förp	Artikelnr.	
hydrogel			
	8 gram	10 st	39060
	15 gram	10 st	39000
	25 gram	10 st	39030



Kliniskt testat på diabetesfotsår



**Purilon Gel** fixerat med Comfeel Plus, hydrokolloidall platta.

## Referenser

1. An in-vitro comparison of the physical characteristics of hydrocolloids, hydrogels, foams and alginate/cmc fibrous dressings. May 2005. Surgical Materials Testing Laboratory.
2. Outcome evaluation of two hydrogels. Hahn T.W mfl. Presented at the 15th Annual Symposium on Advanced Wound Care 2002.
3. Performance and safety of Purilon Gel versus IntraSite Using Biatain Non-adhesive Dressing as secondary dressing in the treatment of diabetic foot ulcers. Capillas R mfl. Presented at the Diabetic Foot Study Group of the EASD 1st Scientific Meeting, 14-17 Sep., 2000 and Spanish at the 12th Conference of the European Wound Management Association, Granada, May 2002.

Utskrifter på referensmaterial kan fås via OneMed Sverige AB eller hämtas på Coloplasts internationella webbsida [www.woundcare.coloplast.com](http://www.woundcare.coloplast.com)

Coloplasts sårhäkningsprodukter säljs och marknadsförs i Sverige av:

**ONEMED**

OneMed Sverige AB  
Box 8255  
SE-163 08 SPÅNGA  
Sverige

[www.onemed.com](http://www.onemed.com)