

Hypafix®



SJÄLVHÄFTANDE
FIXERING I NON-WOVEN



THERAPIES. HAND IN HAND.

BSN medical

HYPAFIX®

SJÄLVHÄFTANDE FIXERING I NON-WOVEN

Hypafix® är en självhäftande väv i non-woven för fixering av förband. Formar sig lätt efter kroppens konturer och fäster bra på rörliga områden. Hypafix appliceras över hela förbandet för att undvika kontaminering. Finns på rulle i olika bredder och längder och erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ. Delat skyddspapper förenklar appliceringen. Kan även användas på patienter med känslig hud. Latexfri.


Indikationer

- Fixering av förbandsmaterial
- Fixering av tuber och dränage


Bruksanvisning



1. Klipp av lämplig längd

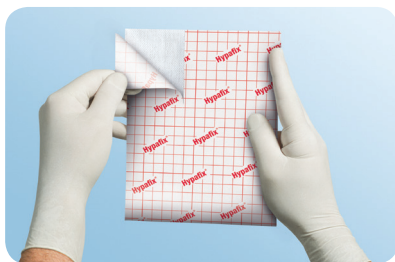

2. Avlägsna ena delen av skyddspapperet och applicera väven över förbandet

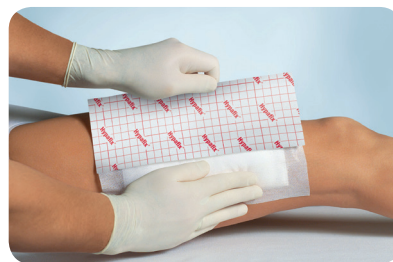

3. Ta därefter bort det andra skyddspapperet och släta ut väven

Art nr	Storlek	Rullar/fp	Rullar/trp
71939-00	10 cm x 2 m	1	12
71443-00	2,5 cm x 10 m	1	24
71443-01	5 cm x 10 m	1	24
71443-02	10 cm x 10 m	1	24
71443-03	15 cm x 10 m	1	24
71443-04	20 cm x 10 m	1	24
71443-05	30 cm x 10 m	1	24



BSN medical AB

Uggledalsvägen 15 · 427 40 Billdal
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com
www.bsnmedical.se

