



Transparent sårfilm

Anpassbar även på oregelbunda ytor

Vatten- och bakterietät

Enkel och effektiv applicering

Låg risk för utvecklande av allergi

 **smith&nephew**

OpSite[◇]Flexigrid

Transparent filmförband



OpSite \diamond Flexigrid - Transparent sårfilm

- Enkel och effektiv applicering
- Anpassbar även på oregelbundna ytor
- Låg risk för utvecklande av allergi
- Snabbare, säkrare och mindre smärtsam sårhäkning

Opsite Flexigrid sårfilm är originalet som bildat standard i fråga om sårbehandling. Marknadens bästa sårfilm med ett enkelt och effektivt applikationssystem - Flexigrid.

Fördel

Enkel och effektiv applicering
FLEXIGRID Applikationssystem erbjuder en enkel, elastisk, effektiv och följsam applicering. Möjliggör applicering med endast en hand. Det formbara materialet gör filmen lätt att anpassa till kroppens form och dess transparens underlättar placering exakt och rätt över sårområdet. Dessutom är det både spännande och betydelsefullt för patient såväl som personal att följa sårhäkningsprocessen över tid.

Dokumentation av sårstorleken

En unik sårmätningssätt, som gör det möjligt att exakt bedöma framskridandet av sårhäkningsprocessen. Sårrets konturer markeras med bläckpenna på den matta sidan av filmen eller tuschpenna på den blanka sidan av filmen. Efter markeringen avlägsnas Flexigrid och arkiveras tillsammans med patientens journal. Komplettera gärna med datum, lokalisering av såret samt patientdata.

Anpassbar även på oregelbundna ytor

Elastisk och följsam över alla ytor på kroppen. Filmerna kan med lätthet klippas i remsor för att fästas över besvärliga ytor såsom häl, armbåge och knä.

Låg risk för utvecklande av allergi

En unikt sammansatt häftmassa av akryl som fäster lättare på fuktig hud. Viktigt är att utnyttja elasticiteten genom att dra ut filmen sidledes vid avlägsnandet.

Dokumenterad effekt


OPSITE-filmerna är mycket töj och formbara med god förmåga att släppa igenom luft. Den kan sitta kvar i upp till 14 dagar, vilket medför att sårområdet irriteras så litet som möjligt. Risken för sekundär infektion reduceras såväl som kortare tid för skötsel av patienten.

Snabbare, säkrare och mindre smärtsam sårhäkning

Opsite har bildat standard i fråga om sårhäkning genom att bilda en fuktig sårhäkningsmiljö. De näringsämnen som finns i sårvätskan är vitala för nybildningen av celler och vita blodkroppar som hjälper till att förhindra infektion. OPSITE erbjuder en miljö som befrämjar en snabbare, säkrare och mindre smärtsam sårhäkning.

Kostnadseffektiv

Genom få förbandsbyten minimeras kostnaden.

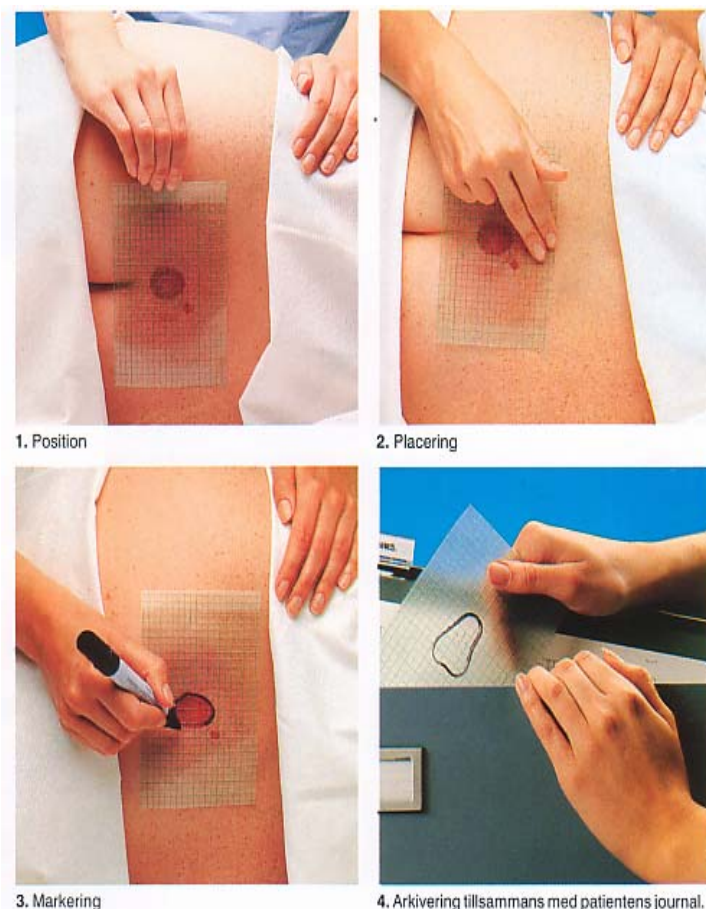

INDIKATIONER

1. Yttliga trycksår.
2. Profylax av trycksår.
3. Mindre bränn- och skållskador.
4. Skrubbsår och hudavskrapningar.
5. Postoperativt förband.
6. Hudskydd runt stomier och under proteser.
7. Tagställen efter transplantationer.
8. Täckförband över sårgel etc.
9. Smärtsam diabetesneuropati.

ATT OBSERVERA VID APPLIKATION

Förbered huden före applicering av OPSITE. Det är också viktigt att avlägsna överflödigt fukt. Om nödvändigt avtorkas huden med alkohol för att avlägsna fett. Riklig hårväxt rakas eller klipps bort för att underlätta en god vidhäftning.

<i>Art.nr</i>	<i>Produkt</i>	<i>St/tp</i>
4628	6 x 7 cm	100
4629	10 x 12 cm	10
4630	10 x 12 cm	50
4631	15 x 20 cm	10
4632	12 x 25 cm	20