

**sealtight**<sup>®</sup>  
ORIGINAL



## DUSCHSTRUMPA

- Flergångsanvändning
- Skyddande för lindade ben



**THERAPIES. HAND IN HAND.**

**BSN** medical

an Essity company

# SEAL-TIGHT®

## DUSCHSTRUMPA

- Även om man är gipsad eller bandagerad är det viktigt att ha god hygien
- Med Seal-Tight® duschstrumpa kan man enkelt duscha utan att man förstör gips eller lindorna
- Mycket enklare än att använda plastpåse och tejp
- En elastisk gummiring försluter om benet så att inget vatten kommer in
- Tålig vinyl gör att vatten inte tränger genom skyddet
- Kan vid normal hantering användas dagligen i 6-8 veckor
- Användningsområde: För att skydda gips och lindor
- Latexfri

### Material

Seal-Tight® duschstrumpa är tillverkad av kraftig, transparent vinyl. Strumpan är fäst i en plastring av hållfast polypropylen. Inuti ringen sitter en packning av syntetisk gummi med ett hål i mitten. Gummipackningen sluter tätt kring den arm eller det ben som ska skyddas från vatten.

## BESTÄLLNINGSGENOMGÅNG

Art.nr	Storlek	Längd	Antal/fp
<b>Vuxen</b>			
72045-09	Underarm	56 cm	1
72045-07	Hel arm	99 cm	1
72045-10	Underben	59 cm	1
72045-08	Hel ben	107 cm	1
72045-11	Fot	28 cm	1
<b>Barn</b>			
72045-01	Arm	46 cm	1
72045-00	Arm	71 cm	1
72045-04	Ben	46 cm	1
72045-05	Ben	79 cm	1

### Bruksanvisning

- 1 Lyft med hjälp av tummar/fingerar innanför gummipackningen dusch-strumpan upp över gipset stegvis.
- 2 Lyft upp strumpan så långt som möjligt. För därefter tillbaka plastringen något, så att gummiringens innerkant pekar uppåt. V.g. se bild.
- 3 OBS! Tänk på att våt plast kan vara halkig i badkar och på golv! Använd gärna halkskydd.
- 4 Duscha av strumpan efter användning och låt droptorka.



## BSN medical AB

Uggleåsvägen 15 · 427 40 Billdal  
Tel: 031-727 98 00 · Fax: 031-727 98 10

kundservice@bsnmedical.com  
www.bsnmedical.se

**BSN** medical

an Essity company