



Vliwaktiv®

- kompress med aktivt kol

Egenskaper:

- ✓ Idealisk kombination av en absorberande kompress som inte fastnar och ett sårforband som binder odör och absorberar bakterier
- ✓ Kompressen är icke vidhäftande och den goda dräneringen av sårexsudat verkar gynnsamt för sårläkningen.
- ✓ Ett hudvänligt, andningsaktivt fiberdukshölje främjar vidarebefordran av exsudat till den absorberande kärnan.
- ✓ Bakterier och lukter binds i kompressen.
- ✓ Barriär förhindrar läckage av sårsekret till kläder och/eller sängkläder.

Indikationer:

- ✓ För omhändertagande av infekterade och variga sår med odör
- ✓ För måttligt till kraftigt vätskande sår med obehaglig lukt, t ex bensår, decubitus, analfistlar
- ✓ Som sekundärförband i kombination med förband för fuktighetsbevarande sårbehandling
 - Suprasorb A
 - Suprasorb A + Ag
 - Suprasorb C
 - Vliwaktiv Ag tamponadmaterial

Omlägningsfrekvens:

- ✓ Beror på såret, mängden sårvätska och eventuellt primärförband. Byts när den är mättad.

Material:

- ✓ Icke vidhäftande och omslutande ytskikt en fiberduk av polyeten
- ✓ Mellanskikt med aktivt kol-viskosväv
- ✓ Absorberande kärna av cellulosa
- ✓ Barriärskydd för kläder och sängkläder av polypropen

Förpackningar:

- ✓ Produktförpackning av cellulosa
- ✓ Avdelningsförpackning av cellulosa
- ✓ Transportkartong i wellpapp av cellulosa

Förvaring och hållbarhet:

- ✓ Förvaras torrt och i rumstemperatur
- ✓ Rätt förvarad är hållbarheten 5 år från tillverkningsdatum

Produktklassificering:

- ✓ CE-märkt enligt Medicinska Direktivet som Klass Is-produkt
- ✓ Testad enligt EN-Standard 13726-1

Avfallshantering:

- ✓ Produkten hanteras som brännbart avfall
- ✓ Produktförpackning hanteras som brännbart avfall
- ✓ Avdelningsförpackning källsorteras eller hanteras som brännbart avfall
- ✓ Transportkartong källsorteras

Storlek	Lev art nr	Avd fp	Trp fp
10cm x 10cm S	20 254	20	400
10cm x 20cm S	20 255	20	200

Bruksanvisning:

- ✓ För måttligt till kraftigt vätskande sår med obehaglig lukt, till exempel bensår, dekubitus, analfistlar.
- ✓ Som sekundärförband i kombination med förband för fuktighetsbevarande sårbehandling

1. Förbered såret:

Såret skall som vanligt tvättas noggrant och därefter torkas rent med en kompress. Den omgivande huden skall vara torr och ren.

2. Applicering av sårförbandet:

- a) Välj storlek efter sårytan. Förbandet skall överlappa såret med minst 2-3 cm.
- b) Öppna steriltförpackningen och tag upp förbandet.
- c) Applicera förbandet på såret.

3. Byte av förband:

Behandlingsläkaren bestämmer hur ofta Vliwaktiv skall bytas beroende på sårets läkningsgrad.

- a) Förbandet skall bytas beroende på såret, vätskemängden, ett eventuellt primärförband och när det är mättat. Byts när kompressen är mättad.

Försiktighetsåtgärder:

- ✓ Klipp inte sönder Vliwaktiv, eftersom partiklar av aktivt kol då kan hamna i såret.
- ✓ Produkten bör ej användas vid känd allergi mot en eller flera av de i produkten ingående komponenterna.