


Mepore[®] Pro

Duschbart, självhäftande absorberande förband

Mepore Pro är ett självhäftande, absorberande och ångpermeabelt förband med ett yttre filmlager som skyddar såret från vatten och kontamination. Den hudvänliga, vattenbaserade, lösningsmedelsfria polyakrylathäftan ger en varsam men säker fixering.

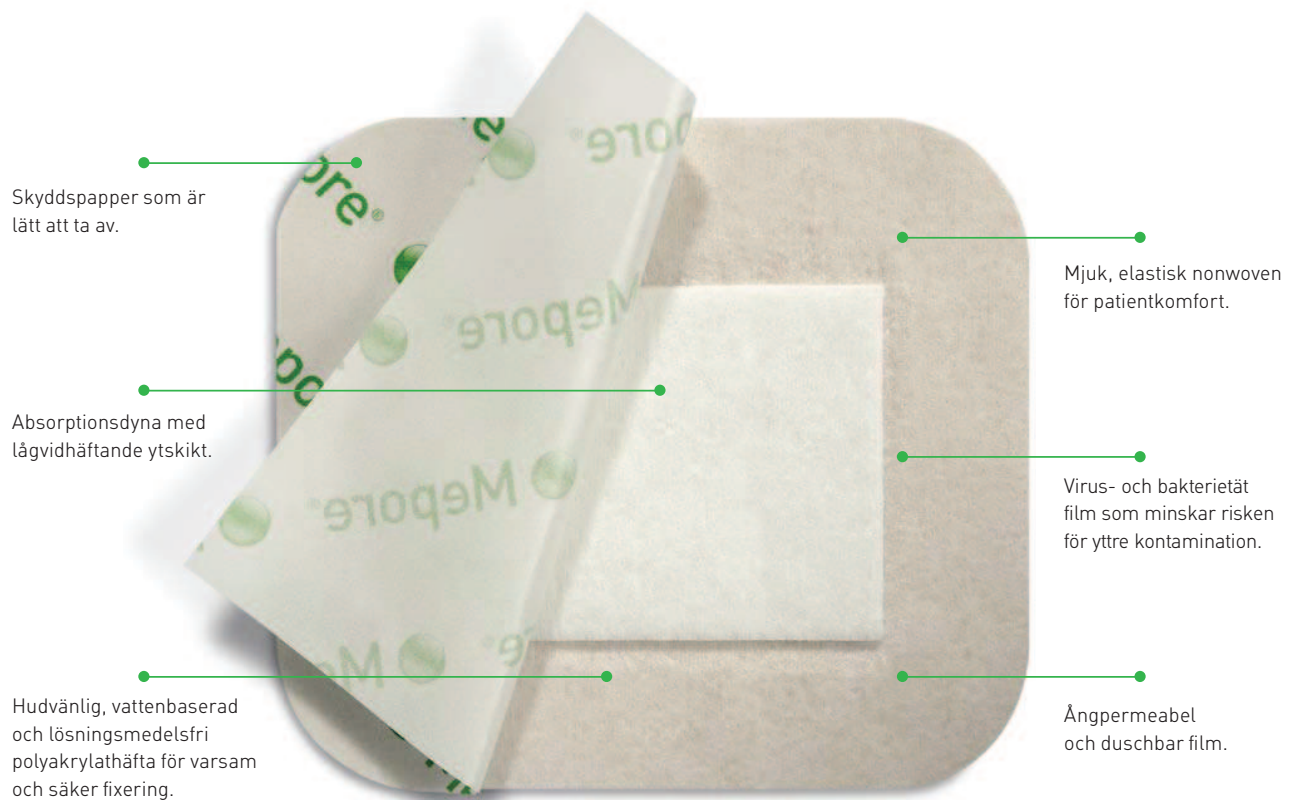

Så här fungerar Mepore Pro

Den ångpermeabla filmen är duschbar och skyddar såret från vatten och kontamination. Den skyddar också kläder och sängkläder från blod och sårvätska. Tack vare den högabsorberande sårdynan och filmens höga ångpermeabilitet har förbandet en god vätskehanteringsförmåga. Polyakrylathäftan har utvecklats för att vara hudvänlig samt för att ge säker fixering.

Skyddspappret är lätt att avlägsna och möjliggör enkel och steril applicering. Även produktens material underlättar appliceringen.

Användningsområden

Mepore Pro kan användas på ett stort antal sår som är svagt till måttligt vätskande, t.ex. suturerade sår, skär- och skrubbsår.

Så här används Mepore Pro



Öppna förpackningen och ta ut förbandet.



Ta tag i greppkanten på skyddspappret och lossa det en liten bit så att förbandet kan fästas på huden.



Fäst förbandet på huden utan att sträcka det och ta försiktigt bort resten av skyddspappret. Stryk och värms med handen över kanterna så att förbandet fäster ordentligt.

Bytesfrekvens

Bytesfrekvensen avgörs av sårets tillstånd. Vid avlägsnande – ta tag i kanten och dra försiktigt av förbandet i hårens växtriktning.


Fördelar med Mepore Pro

- Duschbar
- Lågvidhäftande sårdyna minskar risken för att förbandet ska fastna i såret
- Skyddar såret från vatten och kontamination
- Virus- och bakterietät film
- God absorptionsförmåga
- Skyddspappret är lätt att ta bort och möjliggör enkel och steril applicering.
- Ångpermeabelt

- Låg friktion mot kläder och sängkläder
- Hudvänlig, vattenbaserad häfta
- Runda hörn för säker fixering (alla storlekar upp till 9 x 15 cm)

Observera

Precis som andra självhäftande förband ska Mepore Pro inte sträckas vid applicering, eftersom det kan skada huden. Detta är särskilt viktigt när förbandet appliceras över leder. Förbandet ska ej användas på personer med allergi mot någon ingående komponent.

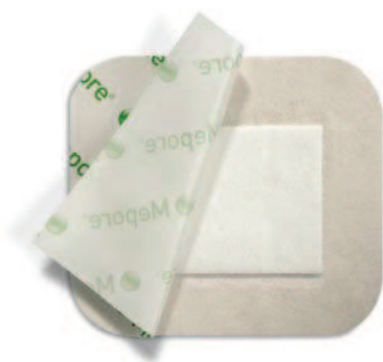

Mepore Pro levereras sterila, enstycksförpackade

| Art nr | Storlek | Storlek sårdyna | Avd fp | Transp fp |
|-------------------------|-----------|-----------------|--------|-----------|
| 670820 | 6 × 7 cm | 3 × 4 cm | 60 | 480 |
| 670920 | 9 × 10 cm | 4,5 × 6 cm | 40 | 320 |
| 671020 | 9 × 15 cm | 4,5 × 10 cm | 40 | 320 |
| 671120 | 9 × 20 cm | 4,5 × 15 cm | 30 | 180 |
| 671220 | 9 × 25 cm | 4,5 × 20 cm | 30 | 180 |
| 671320 | 9 × 30 cm | 4,5 × 25 cm | 30 | 270 |
| Apotekssortiment | | | | |
| 680840 | 6 × 7 cm | 3 × 4 cm | 10 | 140 |
| 680940 | 9 × 10 cm | 4,5 × 6 cm | 10 | 200 |
| 681040 | 9 × 15 cm | 4,5 × 10 cm | 10 | 140 |
| 681140 | 9 × 20 cm | 4,5 × 15 cm | 10 | 140 |

Mölnlycke Health Care AB
Box 13080, 402 52 Göteborg
Telefon: 031-722 30 00
www.molnlycke.com

Mölnlycke-symbolen och textbilden är registrerade varumärken hos Mölnlycke Health Care AB.